

Prontosan®

STERILE, GEBRAUCHSFERTIGE WUNDSPÜLLÖSUNG



- Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- Entfernt Biofilm² (inkl. MRSA)
- Verhindert die Neubildung von Biofilm⁵
- Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- Dermatologische Unbedenklichkeit
- Kompatibel mit allen B. Braun Verbandstoffen
- Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch

WUNDSPÜLUNG – DER 1. SCHRITT ZUR WUNDHEILUNG

Abgestorbenes Gewebe, Zelltrümmer, Blut, Eiweiß und die Ausbildung von Biofilm können auf der Wunde eine fast undurchdringliche Schicht bilden – den Wundbelag. Dieser Belag ist ein Hemmnis für die Regeneration. Er bedeutet ein hohes Risiko für Wundheilungsstörungen. Voraussetzung für eine gute Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche und des Wundrandes.³ Dies wird unterstützt durch eine effektive und gleichzeitig schonende Wundreinigung mit Prontosan® während des Verbandwechsels.⁵ Nur eine saubere Wunde bildet Granulationsgewebe und heilt!

Undec ylenamidopropyl-Betain

Besonders hochwertiges Tensid
Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen
Sehr gute Hautverträglichkeit
Haut und Schleimhäute werden nicht angegriffen, trocknen nicht aus
Langjährige Erfahrung in der Kosmetikindustrie

Polihe xanid

Sehr gute Haut- und Gewebeverträglichkeit
Keine Resorption (Nachweisgrenze 10 ppm)
Breites Keimspektrum
Remanenzeffekt
Allergenarm

EINSATZGEBIETE

Spülung, Reinigung und Feuchthalten von

- chronischen Wunden
- Wundverbänden
- akuten Wunden (Schnittverletzungen,

Biss-, Platz und Schürfwunden)

- thermischen Wunden,

Verbrennungswunden bis Grad II b

- Spenderarealen bei Hauttransplantationen

Gewebeschonende Ablösung von

- Fibrinbelägen
- Resten von Wundauflagen

Zur intraoperativen Spülung und zur

Instillation für die V.A.C. Ulta^{6,7}

ANWENDUNG

Vor der Anwendung

Zum Öffnen der Flasche weißen Abstandsring entfernen und Verschlusskappe wieder fest aufschrauben.

Anwendungsmöglichkeiten

- Direkte Applikation aus der praktischen Spritzflasche
- Abreiben der Wunde mittels getränktem Tupfer oder Kompresse
- Als Verband bei Spülung auf Körpertemperatur mehrfach möglich
- Zur Spülung von tiefen Wunden ist ein steriler Einmal-Frauenkatheter geeignet
- Zur Spülung und Reinigung von oberflächlichen Wunden 1 – 2 Min. einwirken lassen

Zum Lösen von festsitzenden Wundbelägen und Biofilm sowie stark verschmutzten Akutwunden: Abdeckung des Wundareals mit einer sattnass getränkten Kompresse für 10 bis 15 Min.

TIPPS ZUR EINWIRKZEIT

Da Prontosan® eine Wundspüllösung ist und kein mikrobizid wirkendes Desinfektionsmittel, gilt keine Einwirkzeit im eigentlichen Sinn. Zur Reinigung soll die Wunde intensiv gespült werden, bei starkem Wundbelag ggf. zur Verbesserung der Reinigungsleistung einwirken lassen.



Prontosan®	Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
Patronenflasche im Riegel	40 ml	24 Stück	400484	09513652
Spritzflasche	350 ml	1 Stück	400403	02850062
Spritzflasche mit Aufhänger im Boden für V.A.C. Ulta	1.000 ml	1 Stück	400446	09003678
NPWT Instillation Adapter		10 Stück	3908437	–

Inhaltsstoffe:

0,1 % Undecylenamidopropyl-Betain, 0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid)