



Quo-Lab®

Eine Revolution in der HbA1c Messung

- ◆ Einfache Handhabung
- ◆ Kosteneffektiv
- ◆ Ergebnisse innerhalb von 4 Minuten
- ◆ Duale Berichterstattung vom Nutzer wählbar

Ergonomische, genaue und verlässliche HbA1c Messung.

HbA1c	- Nutzerfreundliche Bedienung minimiert Training - Schritt-für-Schritt Anweisungen auf dem Bildschirm - Sprache wählbar - Benötigt nur 4µl Blut von der Fingerbeere oder einer venösen Probe - Innovativer Blutkollektor für einfache und einheitliche Probenentnahme
Schnell und genau	- Ergebnisse innerhalb von 4 Minuten - Boronat-Affinität Methode: allgemein als Interferenz-frei anerkannt - Messbereich: 4 - 15% A1c - Unpräzision: CV < 3% bei 7% A1c - unbeeinflusst von Hb-Varianten (die nicht mit einer verkürzten Lebenszeit der Erythrozyten verbunden sind) - rückführbar auf IFCC Referenzmethode
Effizientes Datenhandling	- Barcode-Scanner für Kalibrationsdaten, Patienten-ID und Operator ID - Messwertspeicher: 7000 Messwerte - Duale Berichterstattung vom Nutzer wählbar. Wahlmöglichkeiten: % DCCT, IFCC mmol/mol, % JDS, eAG mg/dl oder eAG mmol/l. Weitere Informationen zu eAG (estimated average glucose) finden Sie auf www.ngsp.org - USB-Anschluss - Label-Drucker optional
Ergonomisches Design	- Kompakt: 95 mm(h) x 205 mm(b) x 135 mm(t) - Leichtgewicht: 0.7 kg

Katalog Nr.	Name
3101-0011_VS	Quo-Lab Analyzer Pack



1 Barcode der LOT Kalibrierung scannen. Folie entfernen und in den Analyser einsetzen.



2 Nach Aufforderung den Reagenzball mit dem stumpfen Ende des Probenstäbchens in die Kartusche drücken.



3 Probenstäbchen in die Kartusche einführen und Stiel abbrechen.



4 Abdeckung schließen. Ergebnis wird innerhalb von 4 Minuten angezeigt.

Distributed by

Hersteller

EKF-Diagnostic GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
39179 Barleben
Germany

☎ +49 (0) 39203 511 0
✉ sales@ekfdiagnostics.com

www.ekfdiagnostics.de

EKF | Diagnostics
for life