

REF AL0603



IVD



100 x 3 ml NaCl 0.45%-Lösung

Version: 01, 20/02/2018



medco Diagnostika GmbH
Im Oberfeld 2, DE-94491 Hengersberg
mail@medco.eu, www.medco.eu
A Company of Axonlab

Vertrieb:

Axon Lab AG
www.axonlab.com

NaCl 0.45%-Lösung für ID/AST

Anwendungszweck

Die Kochsalzlösung 0.45%-Lösung für ID/AST ist eine gebrauchsfertige Lösung für Arbeiten mit dem Vitek® System.
Die gebrauchsfertigen Röhrchen mit der 3 ml 0.45%igen NaCl-Lösung können direkt für die Herstellung der entsprechenden Keimdichte je nach verwendeter Vitek®-Karte verwendet werden¹.

Das Produkt nicht über das auf der Packung angegebene Haltbarkeitsdatum verwenden.

Qualitätskontrollen

Qualitätskontrollen werden von jeder Charge durchgeführt.

Packungsinhalt

100 Röhrchen mit je 3 ml 0.45%iger NaCl-Lösung

Basiszusammensetzung in %	
Natriumchlorid	0.45

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Nur für den professionellen Gebrauch.
Bei Anzeichen von mikrobieller Kontamination, Verfärbung, Rissen oder sonstigen Anzeichen von Produktverfall nicht verwenden.

Lagerung und Haltbarkeit

Die Röhrchen mit der 0.45%igen NaCl-Lösung werden bei 15°C bis 30°C gelagert. Nicht einfrieren.

Abkürzungen/Symbol

Symbol	Bedeutung
	Bestellnummer
	In-vitro -Diagnosikum
	Packungsinhalt
	Hersteller
	CE -Kennzeichnung

Literatur

1. Encyclopedia of Rapid Microbiological Methods, Volume II; Edited by: Michael Miller Microbial Identification Using the bioMérieux VITEK® 2 System by David H. Pincus

Axonlab

Headquarters

Axon Lab AG
Täfernstrasse 15
CH-5405 Baden-Dättwil

www.axonlab.com

Affiliates

Austria info@axonlab.at
Belgium info@axonlab.be
Croatia info@axonlab.hr
Czech Republic info@axonlab.cz
Germany info@axonlab.de

Luxembourg info@axonlab.lu
Netherlands info@axonlab.nl
Slovenia info@axonlab.si
Switzerland (de) info@axonlab.ch
Switzerland (fr) info_f@axonlab.ch