


SARAYA Europe

Flächendesinfektion Alpet D2

**Schnelle und wirkungsvolle
Flächendesinfektion.
Wenn Zeit eine Rolle spielt, ist
Alpet D2 auf Ihrer Seite.**

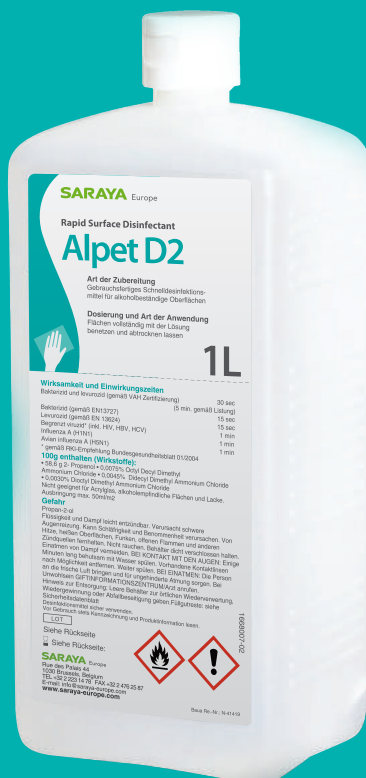

Alpet D2

Flächendesinfektion

PRODUKTMERKMALE

- 60 Sekunden Einwirkzeit erhöht die Effizienz.
- Hohe Aktivität gegen Biofilme, Fette und Öle.
- Schnelle Verdunstung zum Schutz von wasserempfindlichen Geräten.
- Direkt verwendbar, ohne Abspülen.
- Antibakterielle und bakteriostatische Wirkung unterstützt Hygiene.

AKTIVE INHALTSSTOFFE

Isopropanol: 58.6 %

Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chlorid : 0.0075 %

Didecyl Dimethyl Ammonium Chlorid : 0.0045 %

Dioctyl Dimethyl Ammonium Chlorid : 0.0030 %

PHYSIKALISCHE und CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Klare, farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Alkoholgeruch.

GEBRAUCHSHINWEISE

- Reinigen Sie alle Gegenstände, Oberflächen und Geräte vor der Anwendung.
- Sprühen oder wischen Sie Alpet D2 auf die Fläche, bis diese ausreichend befeuchtet wurde.
- Die Einwirkzeit auf der Oberfläche beträgt 60 Sekunden.

Alpet D2 ist ÖGHMP und VAH gelistet.

WIRKSAMKEIT

EN 1040 15 Sekunden

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa

EN 1275 15 Sekunden

- Candida albicans

prEN 13727 15 Sekunden

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae

EN13624 15 Sekunden

- Candida albicans

DGHM Methoden 30 Sekunden

Quantitativer Suspensionstest (unter hoher Belastung)

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae
- Candida albicans

DGHM Methoden 30 Sekunden

Flächendesinfektion - quantitativer Träger
Mit Mechanik unter hoher Belastung

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae
- Candida albicans

Viren (DVV & RKI Richtlinie)

Vaccinia virus, strain Estree*	60 Sekunden
Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV)	60 Sekunden
Influenzavirus Type A (H5N1)	60 Sekunden
Human Immunodeficiency Virus (HIV 1)	60 Sekunden

***Begrenzt viruzid gemäß DVV & RKI Richtlinie.**

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SARAYA Europe

Rue des Palais 44, 1030 Brussels, Belgium

TEL +32 2 223 14 78 FAX +32 2 476 25 87

E-mail: info@saraya-europe.com

www.saraya-europe.com