

Die neue Generation der Safety-Lanzette

Für die sichere, komfortable und schonende Punktion



Sicherheit für Anwender und Patient

- Nadel und Klinge befinden sich vor und nach Gebrauch stets sicher im Lanzettengehäuse
- Nadelstichverletzungen und Kreuzkontaminationen werden verhindert
- Das sterile Einmalprodukt ist nicht wieder verwendbar


Anwenderfreundliche Handhabung

- Einfache Anwendung durch bereits vorgespanntes System
- Gesicherter Auslöseknopf ohne Risiko einer versehentlichen Auslösung und Inaktivierung des Lanzettensystems
- Guter Griff durch geriffelte abgeflachte Oberfläche
- Zielgenaue Punktion durch kleine Auflagefläche

Patientenkomfort

- Geringes Schmerzempfinden durch ultrascharfe, silikonisierte Klingen und 3-fach geschliffene Nadelspitzen
- Exakt vorbestimmte Einstichtiefen für garantiert gute Ergebnisse bei Kindern und Erwachsenen
- Keine Gefahr von Knochenverletzungen durch minimale Einstichtiefen

Die neue Generation der Safety-Lanzette

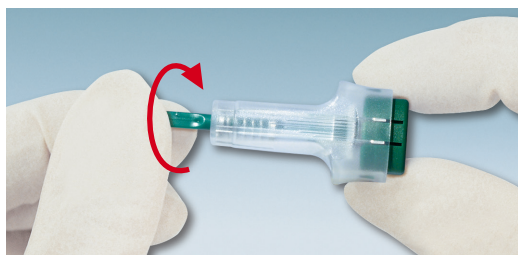

❶ Schutzkappe abdrehen.



❷ Safety-Lanzette gegen die ausgewählte und desinfizierte Punktionsstelle halten. Auslöseknopf drücken.



❸ Safety-Lanzette in eine geeignete Entsorgungsbox geben.

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nadelgröße	Einstichtiefe	Verpackung
85.1015	Safety-Lanzette Mini	28 G	1,6 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1016	Safety-Lanzette Normal	21 G	1,8 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1017	Safety-Lanzette Extra	18 G	1,8 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1018	Safety-Lanzette Super	Klinge 1,5 mm	1,6 mm	200/IK, 1.200/UK
85.1019 (Für Säuglings-Fersen)	Safety-Lanzette Neonatal	Klinge 1,5 mm	1,2 mm	200/IK, 1.200/UK

Microvette® Kapillarblut-Entnahmesysteme runden das Produktprogramm ab



Microvette® 100/200 –
Blutentnahme mit
End-to-End Kapillare



Microvette® 300/500 –
Blutentnahme mit
dem Abnehmerand

Gerne senden wir Ihnen entsprechendes Informationsmaterial zu.

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com