


ANLEITUNG

Anwendung des mikroqid® power mop by schülke.

mikroqid®
power mop
surface cleaning & disinfection

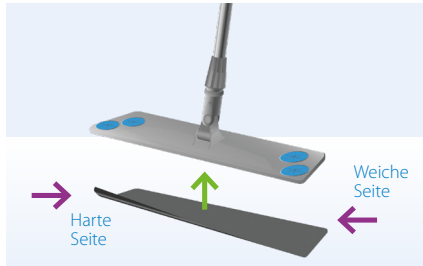

- 1 Zu Beginn muss das Klettband an dem Wischmopphalter befestigt werden. Hierfür wird das Klettband mit der weichen Seite an den Wischmop gedrückt.



- 2 Die bei jedem Nachfüllpack beigelegte Plakette wird auf den Eimer aufgeklebt und wie bekannt ausgefüllt. Der Eimer wird nun geöffnet und ein Nachfüllpack eingestellt.




- 3 Zum Öffnen wird die Einrisskerbe mit einem kräftigen Zug aufgerissen. Danach wird der Eimer wieder geschlossen, um das Austrocknen der Tücher zu vermeiden.



- 4 Achtung: Die Tücher dürfen im Folgenden nur mit Handschuhen angefasst werden.




- 5 Die Tücher sind in der Mitte gefaltet und haben eine blaue und eine weiße Seite, wobei die weiße Seite auf dem Klettband befestigt und die blaue zum Desinfizieren verwendet wird.

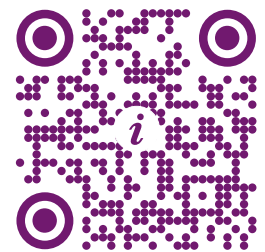


Video: So wenden Sie den mikroqid® power mop an.




- 6 Das Tuch wird auf den Boden gelegt und der Wischmopphalter darauf gedrückt, ohne großen Kraftaufwand.

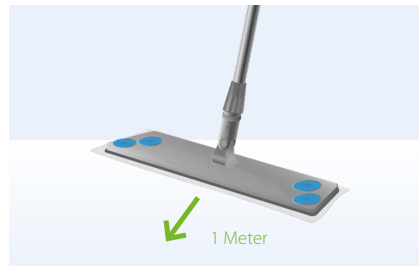


- 7 Wichtig ist es, das Tuch nun „anzuwischen“, um es zu befestigen. Dazu wird mit Druck einen Meter nach vorne gewischt. Nun haftet der mikroqid® power mop am Wischmopphalter und die Desinfektion kann gestartet werden.

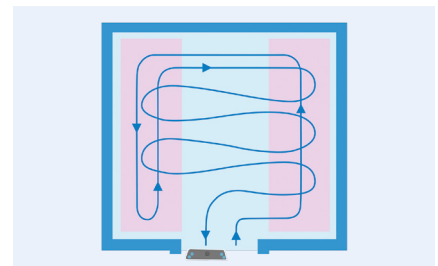

- 8 Legen Sie hierfür eine Spur vor und wischen Sie in Achten zurück. Sobald der mikroqid® power mop den Boden nicht mehr vollständig mit einem Wischfilm benetzt, muss ein neuer power mop verwendet werden.

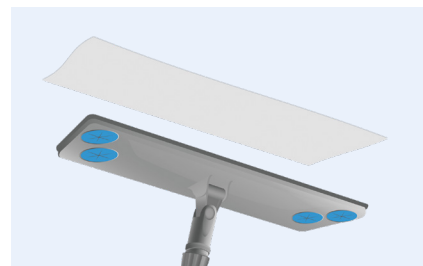

- 9 Nach der Desinfektion wird der mikroqid® power mop gelöst. Hierfür wird der Wischmopphalter umgedreht und der mikroqid® power mop mit der Hand entfernt.

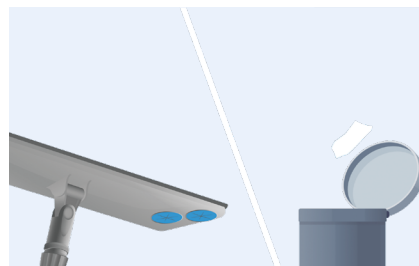

- 10 Im Anschluss wird der power mop in den Restmüll geworfen.

Hinweise:

- ! Den mikroqid® power mop nicht für längere Zeit auf dem Fußboden stehen lassen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.

Der mikroqid® power mop ist nicht zur Desinfektion von Buntmetallen und säureempfindlichen Flächen geeignet.

Die Lebensdauer des Klettbands wird erhöht, wenn dieser trocken und ohne anhaftenden Mopp gelagert wird. Sobald der mikroqid® power mop nicht mehr am Klettband haftet, muss dieses ausgetauscht werden.