



Feuchttuchspender für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen.

## schülke wipes

### Unser Plus

- umfassend einsetzbar
- einfache Handhabung
- 40, 70, 100 oder 111 wipes pro Rolle

### Anwendungsgebiete

Feuchttuchspender zum eigenständigen Befüllen von schülke Flächendesinfektionsmitteln. schülke wipes können zur Flächendesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten sowie Flächen eingesetzt werden.

Folgende Größen sind erhältlich:

- schülke wipes 40 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 70 (28 x 23 cm)
- schülke wipes 100 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 111 (30 x 24 cm)

### Anwendungshinweise

#### Befüllung unter hygienischen Bedingungen

Zunächst die Hände desinfizieren, frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Danach den Deckel des Feuchttuchspenders öffnen und die entpackte Vliesrolle einsetzen. Ziehen Sie das innerste Tuch ein kleines Stück aus der Mitte heraus. Anschließend 2 Liter bei gebrauchsfertigem Produkt und 3 Liter bei Gebrauchslösung aus einem Konzentrat langsam spiralförmig über die Vliesrolle geben. (schülke wipes 40/70 1,5 Liter.) Nun das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels einziehen und werfen. Jetzt den Verschluss auf den Spender setzen und verschließen bis er einrastet. Ebenfalls die Schutzkappe des Entnahmesystems sorgfältig verschließen. Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt. In der Zwischenzeit, wie auch bei jeder Nachbefüllung, den Präparatenamen, die gewählte Einsatzkonzentration, die Einwirkzeit und das

Befülldatum auf dem Etikett, welches jeder Vliestuchrolle beiliegt, dokumentieren und auf das vorgesehene Feld kleben. Verwenden Sie hierzu nur die von schülke empfohlenen Präparate. Die Angaben des Herstellers der verwendeten Desinfektionspräparate zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentrationen, Hinweise zum Wirkspektrum und Anwendungshinweise sind zu beachten. Sichtbare Verunreinigungen vor der Desinfektion entfernen. Oberfläche gründlich mit getränktem Vliestuch abwischen. Auf vollständige Benetzung achten. Nach Tuchentnahme die Deckelöffnung wieder fest verschließen, um ein Austrocknen der Tücher zu vermeiden. Ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Die wiederaufbereitbaren Tuchspender sind nicht geeignet für den Einsatz in Risikobereichen. Hier empfehlen wir die schülke wipes safe & easy bag-in-box / schülke wipes safe & easy bagless. Darüber hinaus sollte auch das eingesetzte Desinfektionsmittelpräparat auf seine Eignung hin für Risikobereiche geprüft werden.

#### Reinigung und Desinfektion

Bitte beim Wischen mit den getränkten Tüchern auf eine vollständige Benetzung der Flächen und nach jeder Tuchentnahme auf ein sorgfältiges Verschließen der Entnahmeöffnung, um einer Austrocknung der Tücher vorzubeugen, achten. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

#### Wiederbefüllung unter hygienischen Bedingungen

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender zu reinigen und zu desinfizieren. Bei allen schülke Produkten beträgt die Standzeit 28 Tage, ausgenommen: terralin® PAA\*. Weitere Informationen können Sie unserem Beipackzettel entnehmen.



## Bestellinformation

| Artikel                                           | Lieferform | Art.-Nr.                  |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| schülke wipes 100 ST RO                           | 6/Karton   | 70003346<br>PZN: 18050412 |
| schülke wipes 130 ST RO                           | 6/Karton   | 70003348<br>PZN: 18050470 |
| schülke wipes mini Feuchttuchsp. 1 ST EM          | 5/Karton   | 70003211<br>PZN: 18050524 |
| schülke wipes Feuchttuchsp. 1 ST EM               | 5/Karton   | 70003212<br>PZN: 18050518 |
| schülke wipes 70 Spenderbox 1 ST EM               | 5/Karton   | 70003214<br>PZN: 18050487 |
| schülke wipes (6x70 Tücher)                       | 1/Karton   | 119505<br>PZN: 10201024   |
| schülke wipes (6x111 Tücher)                      | 1/Karton   | 119506<br>PZN: 10201018   |
| schülke wipes 100/111 Spenderreimer               | 1/Karton   | 119523<br>PZN: 01128630   |
| schülke wipes (10x40 Tücher)                      | 1/Karton   | 119532<br>PZN: 06492837   |
| schülke wipes 70 Spenderbox                       | 1/Karton   | 119540<br>PZN: 10308667   |
| schülke wipes 100/111 Spenderbox                  | 1/Karton   | 119541<br>PZN: 10308673   |
| schülke wipes 130 (6 x 130 Tücher)                | 1/Karton   | 70000021                  |
| schülke wipes 70 Spenderbox (5 x1 Stück)          | 1/Karton   | 70000160                  |
| schülke wipes 100/111 Spenderbox (5x1 Stück)      | 1/Karton   | 70000161                  |
| schülke wipes 100/111 Spenderreimer (5x1 Stück)   | 1/Karton   | 70000162                  |
| schülke wipes mini 40/70Spenderreimer (5x1 Stück) | 1/Karton   | 70000163                  |
| schülke wipes Box Deckel 70/100/111               | 1/Karton   | 70001106                  |

## Verwandte Produkte

- antifact® N liquid
- buraton® rapid
- mikrocid® AF liquid
- mikrocid® sensitive liquid
- perform® advanced alcohol EP
- perform® classic alcohol EP
- perform® classic concentrate Q-Plus
- terralin® liquid
- terralin® PAA
- terralin® protect

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

\*terralin® PAA kann nur in Kombination mit den schülke wipes 40 und 3 l Gebrauchslösung angewendet werden. Die Standzeit beträgt 12 Stunden.

## Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen                  | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|----------|
| Wandhalterung schülke wipes Box   | 134435   |
| Wandhalterung schülke wipes Eimer | 134430   |



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)