



TRICURO

SCHNELLSTART


MOIN!

Herzlichen Dank, dass du dich für den TRICURD go entschieden hast.
Wir wünschen dir viel Erfolg damit. Falls du Fragen zum Messgerät
oder der App hast, wende dich gerne an: service@kentago.com.
Aktuelle Infos und Downloads findest du unter www.tricuro.de

AUFBAU DES TRICURO GO

Wir haben das Messgerät so designt, dass du bei der Anwendung nichts falsch machen kannst. Hier zur Übersicht die wesentlichen Funktionen:


- 1 Druckschalter zum Ein-und Ausschalten
- 2 Mess-und Führungsräder
- 3 Fläche zum Verbinden des Smartphones
- 4 LED Anzeigen
- 5 USB-Anschluss zum Laden des Messgerätes

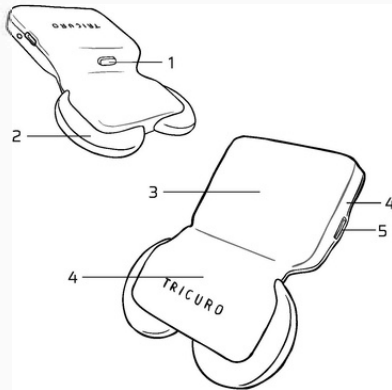

0 J

ÖFFNE DIE VERPACKUNG

Du findest darin deinen neuen TRICURO go und die Bedienungsanleitung sowie einen Metallstreifen für die magnetische Halterung und ein USB-Ladekabel unter dem Einsatz.

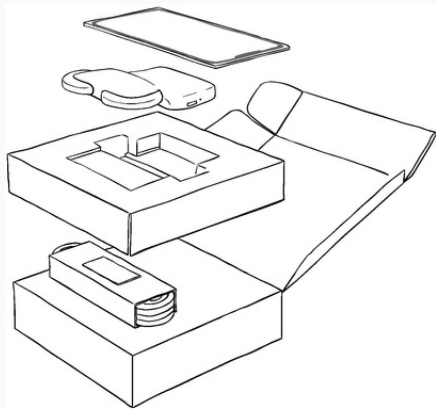


2

BRINGE DEN METALLSTREIFEN AN

Nimm den Metallstreifen aus der Banderole und klebe ihn entweder auf die Rückseite deines Smartphones oder auf eine passende Schutzhülle. Beide Varianten sind prima geeignet, um den


TRICURO go stabil an deinem Smartphone anzubringen. Positioniere den Metallstreifen so, dass der Absatz des TRICURO go nahtlos an der Seite deines Smartphones anliegen kann und keine Einstelltasten verdeckt werden.

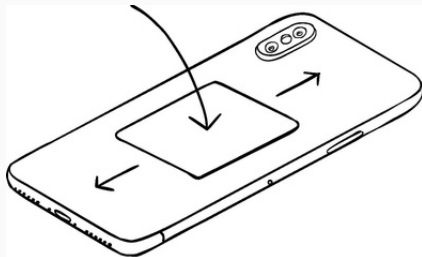

3

VERBINDE MESSGERÄT UND SMARTPHONE

Lege den TRICURD go mit der glatten Fläche auf den Metallstreifen an deinem Smartphone. Die Magnete im Messgerät werden sich hörbar mit dem Metallstreifen verbinden. Prüfe bitte vor der Anwendung, dass das Messgerät stabil an deinem Smartphone sitzt.

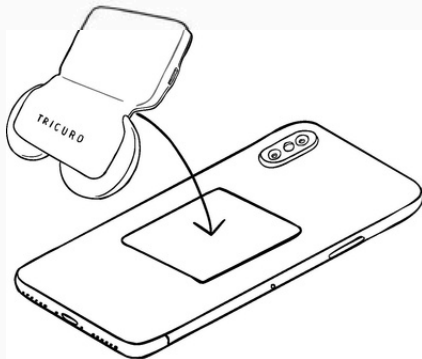


4

INSTALLIERE DIE APP

Bitte verwende dazu den Suchbegriff „TRICURD go“ im Google Play Store oder im App Store von Apple oder nutze den Link auf unserer Website www.tricuro.de.

Stelle als nächstes sicher, dass Bluetooth und auch die Standorterkennung auf deinem Smartphone aktiviert sind.

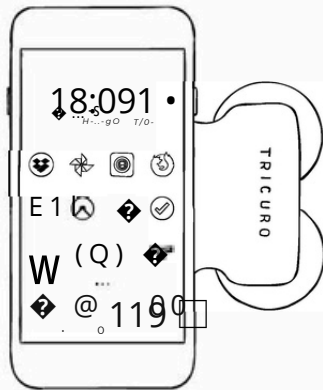


5

STARTE DIE APP

Bitte starte die App vor dem Einschalten des Messgerätes. Sie wird bei jedem Start automatisch versuchen, über Bluetooth eine Verbindung zum TRICURO go aufzubauen.

Sollte das einmal nicht funktionieren, prüfe bitte, ob sich dein Smartphone im Flugmodus befindet. Deaktiviere diesen Modus und starte die App gegebenenfalls neu.

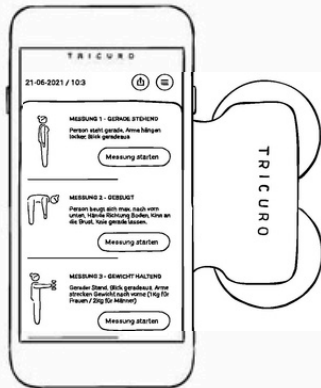


6

SCHALTE DEN TRICURO GO EIN

Das geht ganz easy über den Startknopf in der Mitte des Messgerätes. Eine durchgehend blau leuchtende LED neben dem USB-Anschluss signalisiert dir, dass das Messgerät betriebsbereit ist. Folge nun den Anweisungen der App zum Start der Messung.

Sollte die LED rot leuchten, lade das Messgerät mit dem USB-Kabel auf, bevor du die erste Messung durchführst.

Ausschalten kannst du den TRICURO go, indem du den Einschaltknopf acht Sekunden lang gedrückt hältst, bis die blaue LED an der Seite des Messgerätes blinkt und ausgeht.

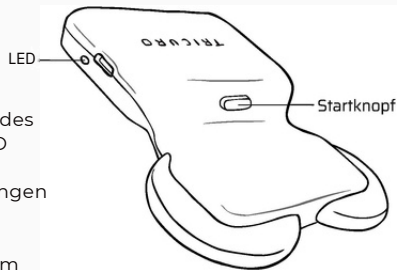

DIE LED-ANZEIGE

Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich eine zweite LED, deren Farben dir jeweils folgenden Betriebszustand signalisieren:



IM LAUFENDEN BETRIEB

-  • Blaue LED an: Bluetooth-Verbindung aktiv
- Blaue LED aus: Bluetooth-Verbindung inaktiv
-  • Grüne LED an: Messung aktiv
(nach Beendigung der Messung wird die grüne LED deaktiviert und die LED färbt sich wieder blau für eine aktive Bluetooth-Verbindung)
-  • Rate LED blinkt: niedriger Batteriezustand
(bitte Akku aufladen)
- Rate LED an: kritischer Batteriezustand
(Messgerät wird sich in Kürze abschalten)

BEIM LADEN DES AKKUS

-  • Rate LED: Akku lädt
-  • Grüne LED: Akku ist aufgeladen

HAPPY MIT DEINEM TRICURO GO?
DANN EMPFEHLE IHN GERNE WEITER!

ODER DOCH NICHT SO?
DANN LASS ES UNS WISSEN:

mail@kentago.com
+49 (0)40 226 3835-40

facebook: @KENTAGOCOM
twitter: @KENTAGO_COM
Web www.tricuro.de