

# Stronghold Plus (GM007\*)

## Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

### Zytotoxische Pharmazeutika

Chemische Substanz	Durchbruchzeit (min.)	EN 374 Leistungsstufe
Carmustin (3.3 mg/ml)	20	/
Cisplatin (1.0 mg/ml)	>240	5
Cyclophosphamid (20.0 mg/ml)	>240	5
Doxorubicinhydrochlorid (2.0 mg/ml)	>240	5
Etoposid (20.0 mg/ml)	>240	5
Fluorouracil (50.0 mg/ml)	>240	5
Ifosfamid (50.0 mg/ml)	>240	5
Methotrexat (25.0 mg/ml)	>240	5
Paclitaxel (6.0 mg/ml)	>240	5
Thiotepa (10.0 mg/ml)	130	/

Diese Daten dienen nur zur Orientierung und Information und unterliegen keiner Garantie seitens Unigloves Germany. Die Nutzungsbedingungen liegen letztendlich außerhalb unserer Kontrolle. Da es unmöglich ist, alle Kombinationen von Chemikalien zu testen, wird den Benutzern empfohlen, vor dem Gebrauch die Eignung eines Handschuhs zu testen.