


4

Überprüfen des Scans

Wenn der Scan abgeschlossen ist, erscheinen zwei Bilder auf dem Bildschirm. Transversale und sagittale Ebenen.

- Stellen Sie sicher, dass die Blase innerhalb des Konus zentriert ist und eine gut definierte Blasenwand aufweist.
- Das gelbe Bild ist kreisförmig und befindet sich innerhalb des Zielkreuzes.

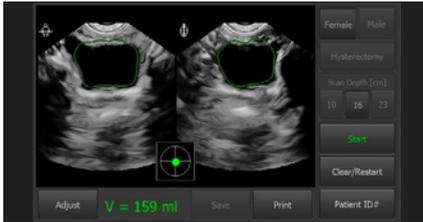


5

Scanergebnis akzeptieren oder anpassen

Wenn Sie den Patienten erneut scannen möchten, tippen Sie auf dem Ergebnisbildschirm auf Scannen. Wiederholen Sie den Scanvorgang bei Bedarf, um Ihr Ziel einzustellen oder die ursprüngliche Messung zu bestätigen.

Einstellen der Messung

Unten links auf dem Bildschirm gibt es die Möglichkeit, die Messung anzupassen. Bewegen Sie die kleinen blauen Kreise mit den Fingern, um sie mit der Blase auf dem Querschnitt auf dem Bildschirm auszurichten. Tippen Sie dann auf das Symbol für die Sagittalebene unten auf dem Bildschirm und passen Sie die Messung nach Bedarf an. Dann tippen Sie auf Fertig. Die angepasste Messung berechnet und zeigt ein neues Volumen an.

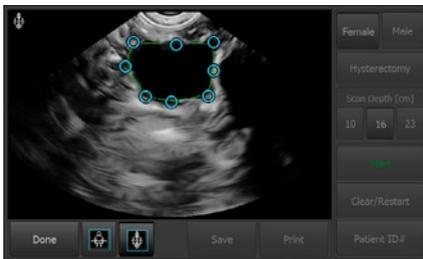

6

Löschen, Reinigen & Parken

- Wählen Sie Löschen / Neuer Patient
- Entfernen Sie das Gel aus dem Abdomen des Patienten und der Sonde.
- Saubere Sonde gemäß den klinischen Richtlinien.

Bringen Sie den Scanner an seinen Aufbewahrungsort zurück und schließen Sie ihn zum Aufladen an.

Wichtig vor der Anwendung

Siehe Schulungsvideo unter:
www.vitacon.com/tutorials

Verwenden Sie Ultraschallgel, andere Gleitmittel sollten nicht verwendet werden

Kontakt

Vitacon AS
 Vegamot 8B
 7049 Trondheim
 Norwegen
sales@vitacon.com
vitacon.com

VITACON.

9/2020