

Die leistungsstarke Software für
die PC-gestützte Blutdruckkontrolle
und Therapieüberwachung.



PROFIL-MANAGER XD

Gebrauchsanweisung Installationsanleitung

Kompatibel mit
boso ABI-system 100 | boso ABI-system 100 PWV
boso TM-2450 | boso TM-2430 PC 2 | boso medicus system
boso medicus PC 2 | boso medilife PC 3



Version 6.0

CE 0124

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	6		
1.1	Vor der Installation	7		
1.1.1	Datensicherung	7		
1.1.2	Bedienung des Programms	7		
1.2	Installation des boso profil-manager XD	8		
1.2.1	Einzelplatzversion	9		
1.2.2	Netzwerkversion	12		
1.2.2.1	Installation des Firebird Datenbankservers.....	13		
1.2.2.2	Installation der Datenbankdatei	13		
1.2.2.3	Installation des boso profil-manager XD	13		
1.2.2.4	Erster Start der Netzwerkversion	14		
1.3	Datenkonvertierung aus Vorversionen	15		
1.4	Installationsanweisung zum USB-Kabel			
1.5	für boso TM-2430 PC 2	17		
2	Treiberinstallation für TM-2450 unter Windows 8/8.1	17		
2.1	Start	18		
2.1	Register Patient, gültig für alle Anwendungen	19		
2.1.1	Schaltfläche „Neu...“	19		
2.1.2	Schaltfläche „Ändern...“	19		
2.1.3	Schaltfläche „Löschen...“	19		
2.1.4	Schaltfläche „Export/Import“	20		
2.1.4.1	„Export Excel“	20		
2.1.4.2	„Export Patient (XML)“	20		
2.1.4.3	„Import Patient (XML)“	20		
2.1.5	„Import GDT“	20		
2.1.6	Schaltfläche „Einstellungen...“	21		
2.1.7	Schaltfläche „Drucken...“	21		
	Schaltfläche „Abrechnungsliste“	21		
	Anwendung „ABI/PWV-Messung“	22		
2.1.8	Register „Patient“	22		
3 3.1	Register „Messdaten“	22		
3.2	3.2.1 Schaltfläche „Löschen...“	23		
	3.2.2 Schaltfläche „Export GDT“	23	3.2.3	
	Schaltfläche „Bemerkungen...“	24	3.2.4	
	Schaltfläche „Drucken...“	24	3.2.5	
	Schaltfläche „ABI-Messung“	25	3.2.6	
	Schaltfläche „ABI/PWV-Messung“	25	3.3	
	Register „Profile“	26	3.3.1	
	Schaltfläche „Drucken...“	27	3.4	
	Schaltfläche „Einstellungen...“ im Register „Patient“	28	3.4.1	
	Unterregister „Arzt“	28	3.4.2	
	Unterregister „Import/Export“	28	3.4.3	
	Unterregister „Beurteilung“	30	3.4.4	
	Unterregister „Testmodus“	31	3.4.5	
	Unterregister „Druck-Einstellungen“	32	3.4.6	
	Fehlercodes	33	4	
	Anwendung „24-h Messung“	34	4.1	
	Register „Patient“	34	4.2	
	Register „Messdaten“	34	4.2.1	
	Schaltfläche „Zeitraum löschen...“	37	4.2.2	
	Schaltfläche „Bemerkungen...“	37	4.2.3	
	Schaltfläche „Export GDT“	37	4.2.4	
	Schaltfläche „Manuelle Einträge...“	37	4.2.5	
	Schaltfläche „Drucken...“	37	4.2.6	
	Schaltfläche „Programmieren...“	38	4.2.7	
	Schaltfläche „Messwerte auslesen...“	40	4.3	
	Register „Profil Sys/Dia“	41	4.3.1	
	„Ändern“	41	4.3.2	
	„Vergleichskurve“	42	4.3.3	
	„Zeitfenster“	42	4.3.4	
	„Drucken...“	42	4.4	
	Register „Profil MAP“	43	4.4.1	
	„Ändern“	43	4.4.2	
	„Vergleichskurve“	44	4.4.3	
	„Zeitfenster“	44		

Inhaltsverzeichnis

4.4.4 Schaltfläche „Drucken...“	44	4.5
Register „Profil PP“	45	4.5.1
Schaltfläche „Ändern“	45	4.5.2
Auswahlfeld „Vergleichskurve“	46	4.5.3
Auswahlfeld „Zeitfenster“	46	4.5.4
Schaltfläche „Drucken...“	46	4.6
Register „Statistik“	47	4.6.1
Schaltfläche „Ändern“	48	4.6.2
Schaltfläche „Drucken...“	48	4.7
Schaltfläche „Einstellungen...“ im Register „Patient“	49	4.7.1
Unterregister „Arzt“	49	4.7.2
Unterregister „Import/Export“	50	4.7.3
Unterregister „Druck-Einstellungen“	51	4.7.4
Unterregister „Schnittstelle“	52	4.7.5
Unterregister „Grenzwerte“	53	4.7.6
Unterregister „Profil“	54	5
Anwendung „Patientenmessung“	55	5.1
Register „Patient“	55	5.2
Register „Messdaten“	55	5.2.1
Schaltfläche „Zeitraum löschen...“	57	5.2.2
Schaltfläche „Export GDT“	57	5.2.3
Schaltfläche „Manuelle Messwerte...“	57	5.2.4
Schaltfläche „Drucken...“	57	5.2.5
Schaltfläche „Messwerte auslesen...“	58	5.2.6
Schaltfläche „Intervallgrenzen...“	59	5.2.7
Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“	59	5.2.8
Auswahl „Zeitraum“	59	5.3
Register „Profil Sys/Dia“	60	5.3.1
Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“	60	5.3.2
Auswahl „Zeitraum“	61	5.3.3
Auswahlfeld „Zeitfenster“	61	5.3.4
Schaltfläche „Drucken...“	61	5.4
Register „Profil MAP“	62	

5.4.1 Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“	62	5.4.2
Auswahl „Zeitraum“	63	5.4.3
Auswahlfeld „Zeitfenster“	63	5.4.4
Schaltfläche „Drucken...“	63	5.5
Register „Profil PP“	64	5.5.1
Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“	64	5.5.2
Auswahl „Zeitraum“	65	5.5.3
Auswahlfeld „Zeitfenster“	65	5.5.4
Schaltfläche „Drucken...“	65	5.6
Register „Statistik“	66	5.6.1
Schaltfläche „Drucken...“	67	5.7
Schaltfläche „Einstellungen...“ im Register „Patient“	68	5.7.1
Unterregister „Arzt“	68	5.7.2
Unterregister „Import/Export“	69	5.7.3
Unterregister „Druck-Einstellungen“	70	5.7.4
Unterregister „Schnittstelle“	71	5.7.5
Unterregister „Grenzwerte“	72	5.7.6
Unterregister „Profil“	73	6
Garantiebestimmungen	74	7
Haftungsbeschränkung	75	8
Bildzeichenerklärung	76	Auszug
aus der GDT-Satzbeschreibung	78	

1 Lieferumfang

1 Installations-CD

1 Gebrauchsanweisung boso profil-manager XD

Technische Daten

Mindestanforderung für den Betrieb:

- 1 GHz • 1 GB RAM • 100 MB freier Festplattenspeicher
- USB 2.0 Schnittstelle • Windows 8 • 1920 x 1080 Pixel

Genauigkeit der angezeigten Werte:

Systole, Diastole, Puls = Genauigkeit der verwendeten Messgeräte

= Genauigkeit der verwendeten Messgeräte
ABI

für den systolischen Druck
(2 Stellen hinter dem Komma)

PWV = ± 5 % (1 Stelle hinter dem Komma)

Zweckbestimmung

Software zur

- Darstellung der von boso Messgeräten ermittelten Messwerte
- Archivierung der Messwerte in einer eigenen Datenbank
- Datenaustausch mit Praxis-EDV-Systemen via GDT-Schnittstelle
- Programmierung von 24h-Messgeräten
(Intervallgrenzen, Intervalldauer, maximale Aufpumphöhe)
- Steuerung von ABI-Messsystemen (Start und Abbruch einer Messung)

Kontraindikation

Die Software darf nicht zur Überwachung von vitalen physiologischen Parametern eingesetzt werden, deren Änderung zu einer unmittelbaren Gefahr für den Patienten führen könnte.

1.1 Vor der Installation

Mit dem boso profil-manager XD haben Sie sich für eine Software entschieden, die Ihnen bei minimaler Einarbeitungszeit bereits optimale Ergebnisse vorweisen kann. Der boso profil-manager XD wurde bewusst ohne die sonst übliche Menüstruktur aus einzelnen Registern zur Steuerung aufgebaut. In der Gebrauchsanweisung werden aus diesem Grund die einzelnen Fenster bzw. Programmteile, auch als Register bezeichnet, erklärt.

1.1.1 Datensicherung

Um Datenverlust vorzubeugen, sichern Sie regelmäßig die Datei „profman5.fdb“ aus dem Unterverzeichnis C:\ProgramData\Boso\profmanXD\

1.1.2 Bedienung des Programms

Das Programm wird mit der Maus bedient.



Anforderungen an den PC

Der zur Auswertung der ABI/PWV-Messung verwendete Computer muss die europäische Norm EN 60601-1 in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllen.

Die vorliegende Installations- und Gebrauchsanweisung zum boso profil-manager XD ist gültig ab Version 6.0.0.0; sollte es aktuelle Informationen geben, finden Sie diese in der Datei readme.txt auf der Installations-CD. Die Laufwerksbuchstaben in dieser Gebrauchsanweisung sind exemplarisch gewählt:
C:\ für die lokale Festplatte
D:\ für das CD/DVD-Laufwerk


Die Pfadangaben entsprechen einer Standard-Einzelplatzinstallation unter deutschem Windows 10 (64-bit) Betriebssystem und können unter anderen Betriebssystemen oder Sprachversionen abweichen. Microsoft und Microsoft Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

1.2 Installation des boso profil-manager XD

Zur Installation des boso profil-manager XD starten Sie die Datei D:\Bosolnst.exe manuell oder automatisch über die Autostart-Funktion nach Einlegen der CD.

 Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation Administratorrechte besitzen. (Im Zweifelsfall starten Sie das Programm „Bosolnst.exe“ mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“.)


Unmittelbar nach dem Start erscheint folgender Auswahlbildschirm:

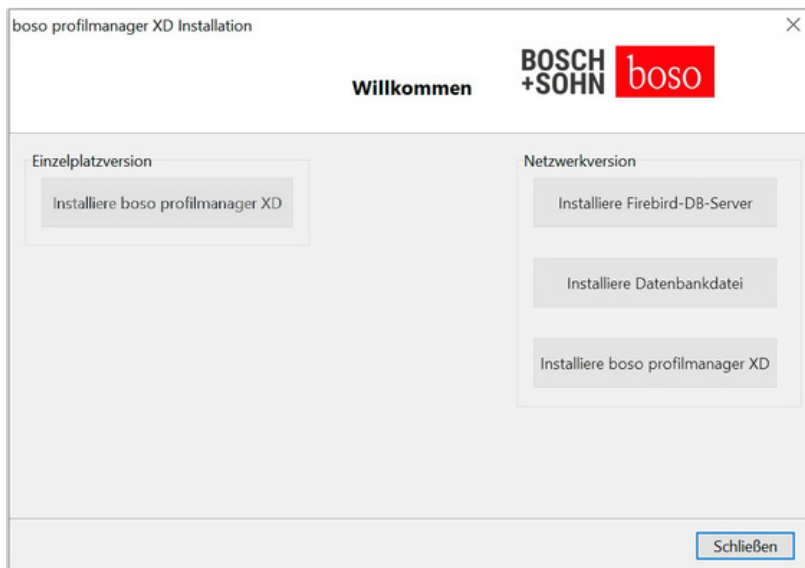

Wählen Sie zwischen Einzelplatzversion und Netzwerkversion.

1.2.1 Einzelplatzversion


Die Einzelplatzversion wird dann verwendet, wenn das Programm nur auf einem Computer betrieben werden soll. In diesem Fall wird keine Installation eines eigenständigen Firebird-Datenbankservers notwendig (ein Embedded Firebird wird verwendet). Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache für die Installation:

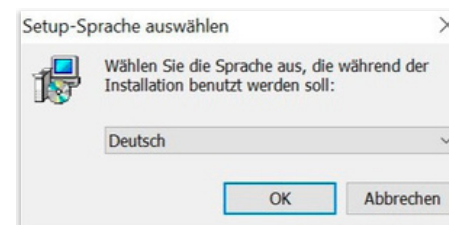


Weiter verfügbar sind:

- | | |
|---------------|---------------|
| - Englisch | - Slowakisch |
| - Französisch | - Finnisch |
| - Italienisch | - Spanisch |
| - Tschechisch | - Ungarisch |
| - Russisch | - Slowenisch |
| - Chinesisch | - Dänisch |
| - Kroatisch | - Polnisch |
| - Rumänisch | - Indonesisch |
| - Estnisch | - Schwedisch |


Da das Programm alle aktuellen boso PC-Geräte bedienen kann, wählen Sie in folgender Maske den Gerätetyp, welcher beim ersten Programmstart aktiviert sein soll. Nach der Installation kann während der Benutzung des Programms jederzeit zwischen den Gerätetypen gewechselt werden.

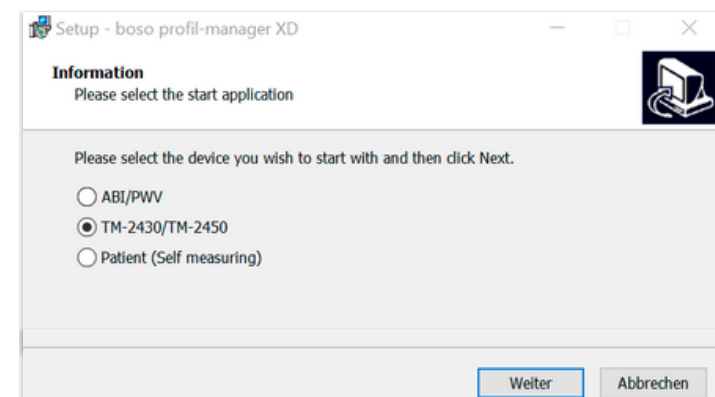

Der Zielordner für die Installation kann individuell verändert werden, meist wird jedoch die Vorgabe unverändert verwendet:

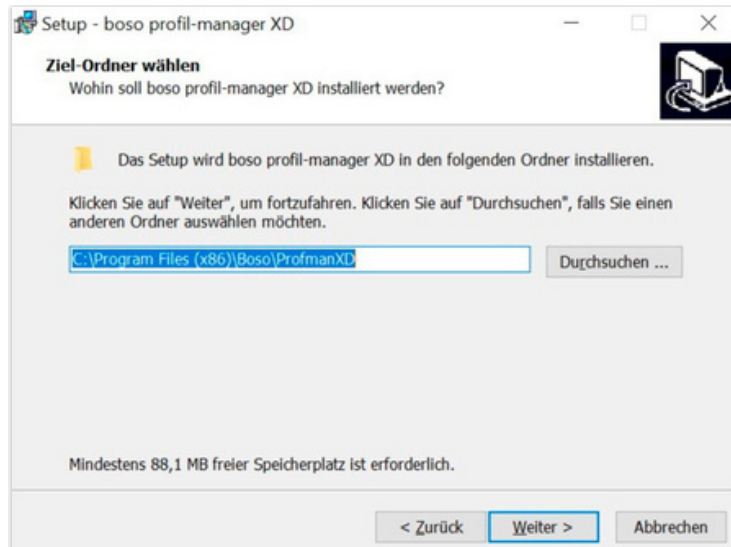

Am Ende der Installation wird bei aktiver Checkbox „Install TM-2430 Driver“ der für das PC-Verbindungskabel benötigte USB-Treiber vorinstalliert.

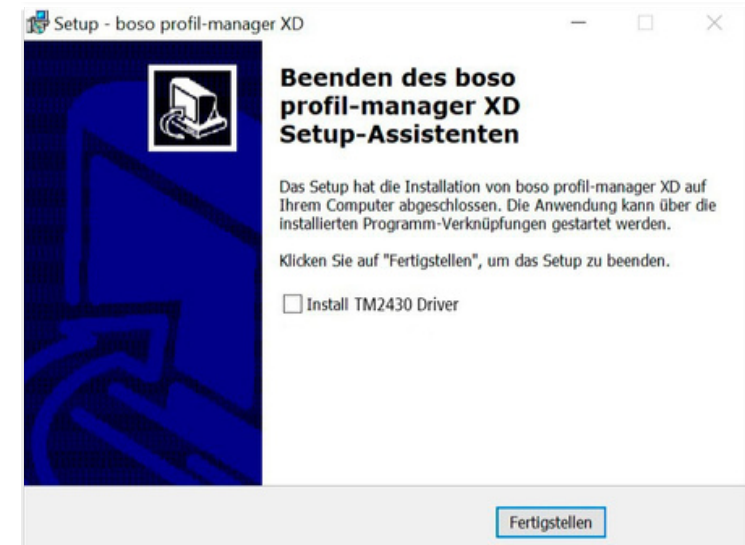

Nach erfolgreicher Installation der boso profil-manager XD Einzelplatzversion schließen Sie den Installationsbildschirm über die Schaltfläche „Schließen“.

Am Ende der Installation wird bei aktiver Checkbox „Install TM-2430 Driver“ der für boso TM-2430 Blutdruckmessgeräte benötigte USB-Treiber vorinstalliert.

1.2.2 Netzwerkversion

Die Netzwerkversion wird dann verwendet, wenn das Programm im IT-Netzwerk auf mehreren Arbeitsplätzen betrieben werden soll.


Die Datenbank kann hier an jedem beliebigen Ort im IT-Netzwerk installiert werden.

Die Installation in einem IT-Netzwerk, das andere Geräte einschließt, kann zu Risiken für Patienten, Bediener oder Dritte führen, die vorher nicht bekannt waren. Die verantwortliche Organisation muss diese Risiken bestimmen, analysieren und beherrschen.

Folgende Änderungen am IT-Netzwerk könnten zu neuen Risiken führen und daher zusätzliche Analysen erforderlich machen:

– Änderung an der IT-Netzwerk-Konfiguration (z.B. Aktualisierung der Firebird-Version, Öffnen eines TCP-Ports, Neukonfiguration Antivirus...)

- Anschließen zusätzlicher Elemente an das IT-Netzwerk
- Entfernen von Elementen aus dem IT-Netzwerk
- „Update“ von Geräten, die mit dem IT-Netzwerk verbunden sind
- „Upgrade“ von Geräten, die mit dem IT-Netzwerk verbunden sind

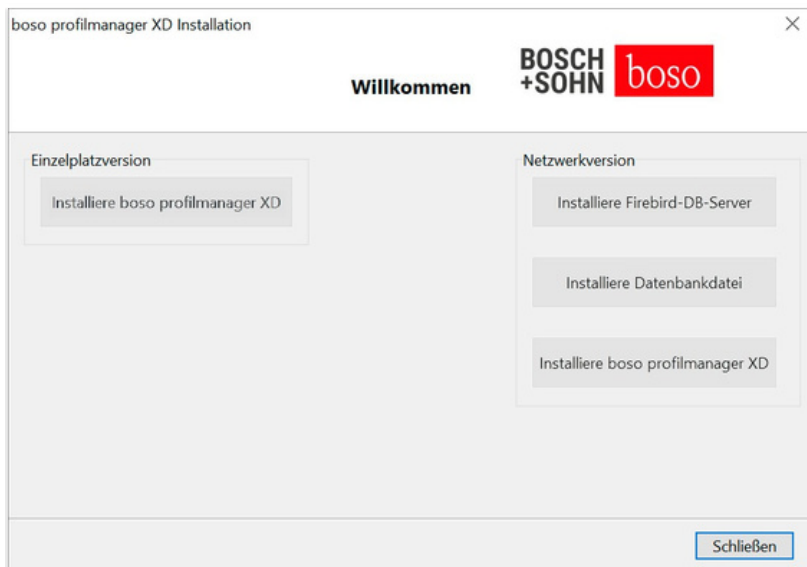

1.2.2.1 Installation des Firebird Datenbankservers

Um den boso profil-manager XD in der Netzwerkversion ausführen zu können, muss auf dem Computer, auf dem die Datenbank gespeichert wird, der Firebird Datenbankserver installiert werden.

Die Installation des Firebird Datenbankservers wird mit der Schaltfläche „Installiere Firebird DB-Server“ gestartet.



Nach der Sprachauswahl folgen Sie dem Installationsassistenten und lassen alle Voreinstellungen unverändert.

1.2.2.2 Installation der Datenbankdatei

Die Datenbankdatei „profman5.fdb“ kann an jedem beliebigen Ort im Netzwerk gespeichert werden.



Es ist zu beachten, dass auf dem Computer, auf welchem die Datenbank liegt, ein aktueller Firebird-Server ab Version 2.5 läuft, bei aktiver Firewall der TCP-Port 3050 für den Zugriff geöffnet ist und ein Antivirenprogramm den Zugriff auf die Datenbank und den Datenbankserver nicht blockiert.

1.2.2.3 Installation des boso profil-manager XD


Der boso profil-manager XD wird über die Schaltfläche „Installiere boso profil-manager XD“ auf jedem beliebigen Computer im Netzwerk installiert.

Folgen Sie dem Installationsassistenten, wie unter [Einzelplatzversion] im Kapitel 1.2.1 beschrieben.

1.2.2.4 Erster Start der Netzwerkversion

Beim ersten Start der Netzwerkversion erscheint ein Login-Fenster zur erstmaligen Anmeldung an der Firebird-Datenbank.

1.3 Datenkonvertierung aus Vorversionen

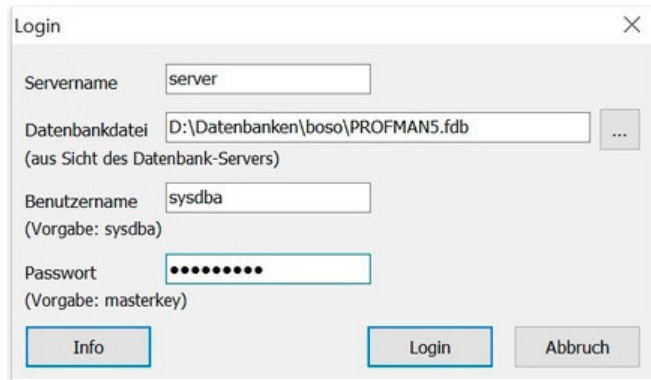

Die hier eingegebenen Login-Daten werden in der Datei „profman.ini“ im Verzeichnis C:\Programme\Boso\ProfmanXD\ gespeichert und können bei Bedarf jederzeit angepasst werden (z.B. wenn die Datenbank an einen anderen Ort im Netzwerk verschoben wird).

Servername:

Name des Servers, auf dem die Datenbank liegt.

Datenbankdatei:

! Laufwerk, Pfad und Name der boso profil-manager XD Datenbankdatei aus Sicht des Servers.


Benutzername:

Login-Information für den laufenden Firebird Datenbankserver. Vorgabe ist „sysdba“. Bei einer bereits vorhandenen Firebird Installation kann die Logininformation abweichen.

Passwort:

Logininformation für den laufenden Firebird Datenbankserver. Vorgabe ist „masterkey“. Bei einer bereits vorhandenen Firebird Installation kann die Login-Information abweichen.

Um vorhandene Daten aus früheren Firebird-Datenbanken zu konvertieren, verwenden Sie das Programm Konverter.exe. Starten Sie das Programm entweder über den Windows-Explorer aus dem Verzeichnispfad C:\Programme\Boso\ProfmanXD\ oder über die Windows-Startfläche unter der Programmgruppe „boso profil-manager XD“ das Programm „Datenübernahme aus Vorversionen“.

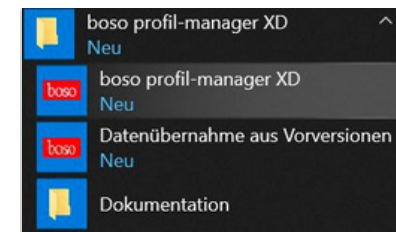

Die zu konvertierenden Datenbanken müssen sich auf dem lokalen System befinden. Eine Konvertierung über das Netzwerk ist nicht möglich.

Geben Sie Benutzername und Passwort zur Anmeldung an den Firebird Datenbankserver ein. Vorgabewerte sind hier „sysdba“ als Benutzer und „masterkey“ als Passwort.

Wählen Sie den Speicherort der boso profil-manager XD Datei im Feld „Ziel-DB (profil-manager XD V 5.1)“.

Wählen Sie die Sprache der Quell-DB.

Wählen Sie die Art der Quell-DB (ABI, profil-manager 3, profil-manager XD 4.x, profil-manager XD 5.x)

Wählen Sie den Speicherort der zu konvertierenden Datenbank. Stellen Sie eine Verbindung zu der Quelldatenbank über die Schaltfläche „Connect“ her.

Nach erfolgreicher Verbindung mit der Quelldatenbank starten Sie die Datenübernahme mit der gleichbenannten Schaltfläche „Übernahme starten“.

Wird nacheinander die Datenübernahme aus mehreren Datenbanken ausgeführt, so werden die Daten in der neuen Datenbank zusammengeführt. Eine Zusammenführung der Messdaten unter einem Patienten erfolgt nur dann, wenn Nachname, Vorname und Geburtsdatum identisch sind. Bei unterschiedlicher Patientennummer wird die Patientennummer der Zieldatenbank erhalten. Stimmen Nachname, Vorname oder Geburtsdatum nicht überein oder sind diese Felder nicht gepflegt, so wird der Patient neu angelegt. Die Patientennummer bleibt erhalten, außer sie existiert bereits in der Zieldatenbank, hier wird eine neue Patientennummer erzeugt. Alle Patienten, welche Nichtübereinstimmungen zeigen werden in einer Liste aufgeführt. Es besteht die Möglichkeit, vor der Datenübernahme die Daten entsprechend zu pflegen. Nicht gepflegte Daten werden nicht übernommen.

1.4 Installationsanweisung zum USB-Kabel für boso TM-2430 PC 2

Während der Installation wird der USB-Treiber vorinstalliert (Standard). Das mitgelieferte USB-Verbindungskabel muss lediglich mit einem freien USB-Anschluss verbunden werden. Das Kabel wird nun automatisch erkannt und installiert.


Hinweis zum boso TM-2430 PC 2:

Wurde der Treiber nicht vorinstalliert, so ist die Datei `dpinst_32bit.exe/dpinst_64bit.exe` (nach Installation im Verzeichnis `C:\Programme\Boso\profmanXD\ftdi\` vorhanden) als Administrator auszuführen und anschließend das USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss zu verbinden.


1.5 Treiberinstallation für TM-2450 unter Windows 8/8.1

Unter Windows 8/8.1 muss dieser manuell von der CD (`D:\Treiber\TM2450\`) installiert werden. Eine Anleitung hierzu befindet sich unter: `D:\Driver\TM2450\`

2 Start

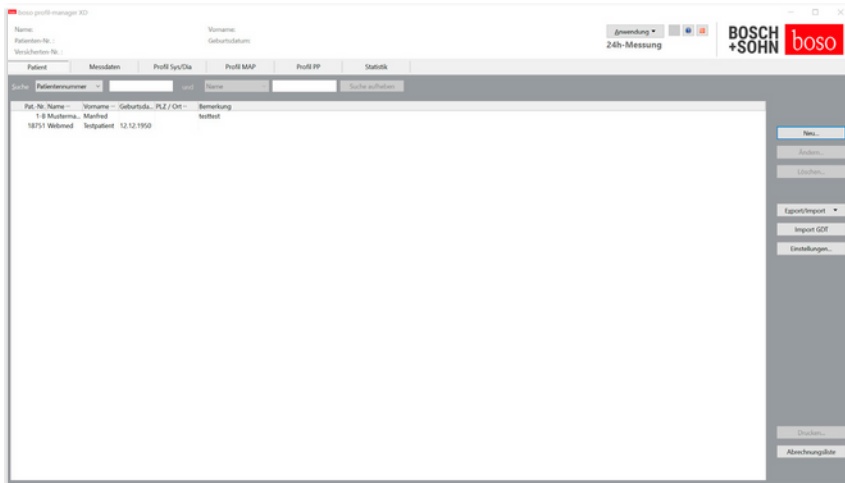

Nach dem Start des profil-manager XD über das Icon „boso profil-manager XD“ wählen Sie den Programmteil entsprechend der aktuell zu verwendenden Geräteanwendung:

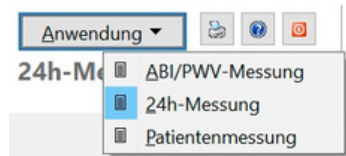

Anwendungen mit bereits gespeicherten Daten werden mit dem Symbol „“ gekennzeichnet. Anwendungen ohne vorhandene Daten werden mit dem Symbol „“ gekennzeichnet.

Wird bei ausgewähltem Patienten zwischen Anwendungen gewechselt, so wird automatisch das Register „Messdaten“ ausgewählt. So vermitteln Messdaten verschiedener Anwendungen einen Gesamtüberblick über alle Messungen eines Patienten.

Aufrufen der Hilfefunktion

Durch Betätigen der F1-Taste oder der Schaltfläche  [Hilfe] können jederzeit diese und weitere Gebrauchsanweisungen im PDF-Format aufgerufen werden.

2.1 Register Patient

– gültig für alle Anwendungen

Die Patientenauswahl erfolgt durch einen Mausklick auf den gewünschten Patienten. Die Patienten können durch einen Mausklick in die Überschrift der gewünschten Spalte sortiert werden. Um die ursprüngliche Sortierung nach Patientennummer wieder herzustellen, verwenden Sie die Funktion „Spaltenanordnung zurücksetzen“. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in die Überschriftzeile der Patiententabelle. Über die Funktion „Suchen:“ kann nach Namen gesucht werden.

2.1.1 Schaltfläche „Neu...“

Anlegen eines neuen Patienten. Name und Patientennummer sind Pflichtfelder. Die Patientennummer wird vom System vorgegeben (Fortlaufende Nummer mit Zusatz „-B“).

Wenn Sie die vorgegebene Patientennummer ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor: "Strg" - Taste auf der Tastatur gedrückt halten und mit der Maus in das Feld "Patienten-Nr." klicken.



Beim Betrieb in der Praxisumgebung wird dringend empfohlen, neue Patienten ausschließlich in der Praxis-EDV anzulegen.

2.1.2 Schaltfläche „Ändern...“

Ändern der persönlichen Daten eines bestehenden Patienten.

2.1.3 Schaltfläche „Löschen...“

Löschen eines Patienten.



Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden, alle Daten (auch Messdaten) aus allen Anwendungsteilen sind unwiderruflich gelöscht.

2.1.4 Schaltfläche „Export/Import“

2.1.4.1 „Export Excel“

„Export Excel“ exportiert die Daten des aktuell gewählten Patienten (aus der aktuellen Anwendung ABI, 24h, Patientenmessung) im Excel-lesbaren .xls-Format. Dateiname und Speicherort sind frei wählbar.

2.1.4.2 „Export Patient (XML)“

„Export Patient (XML)“ exportiert die Daten des aktuell gewählten Patienten im profil-manager XD-lesbaren .xml-Format.

Der Transferpfad wird aus den Einstellungen der Transferdateien für die Einbindung in die Praxis-EDV verwendet (siehe nächstes Kapitel Schaltfläche „Einstellungen...“). Der Dateiname wird zusammengesetzt aus der aktiven Anwendung und der Patientennummer.

Beispiel „2430_10.xml“ steht für die Patientendaten des Patienten mit der Patientennummer 10 aus der Anwendung 24h-Messung.
2430_#.xml steht für die Daten aus der 24h-Messung
ABI_#.xml steht für die Daten aus der ABI-Messung
medicus_#.xml steht für die Daten aus der Patientenmessung
medicus_#-M.XML steht für die Daten aus der boso App

2.1.4.3 „Import Patient (XML)“

„Import Patient (XML)“ importiert die Daten eines ausgewählten Patienten z.B. aus der boso App.

2.1.5 Import GDT

Die GDT-Import-Datei wird, sofern vorhanden, eingelesen und der enthaltene Patient ausgewählt bzw. angelegt. Ist bereits ein Patient mit der importierten Patientennummer vorhanden, wird folgende Maske angezeigt:

Mit der Schaltfläche „Ja, diesen Patienten auswählen“ wird der angezeigte Patient ausgewählt.



Mit der Schaltfläche „Nein, Patientendaten aus Praxis-EDV verwenden“ werden alle vorhandenen Messdaten dem Patienten aus der Praxis-EDV zugeordnet.

2.1.6 Schaltfläche „Einstellungen...“

Da die Einstellungen anwendungsspezifisch sind, werden diese in den Anwendungskapiteln (Kapitel 3–5) erläutert.

2.1.7 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck der Patientendaten erscheint auf dem Bildschirm. Über den gewählten Drucker können die Daten im Anschluss ausgedruckt werden.

Vorgabe für den Papierdruck ist der Windows Standarddrucker.

Wurde in den Druckeinstellungen „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist pmXD_pat#.pdf.

pat# = Patientennummer

2.1.8 Schaltfläche „Abrechnungsliste“

Erzeugung einer zeitlich eingrenzenden Übersichtsliste über die Anzahl der durchgeführten Messungen der aktuell gewählten Anwendung (nicht verfügbar für Patientenmessung). Zum Beispiel zur einfachen Übersicht, wie viele 24h-Messungen im ersten Quartal durchgeführt wurden.


Wurde in den Druckeinstellungen „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist pmXD_cl.pdf.

3 Anwendung „ABI/PWV-Messung“

3.1 Register „Patient“

Siehe Abschnitt „2.1 Register Patient, gültig für alle Anwendungen“.
Schaltfläche „Einstellungen“ siehe Kapitel 3.4

3.2 Register „Messdaten“

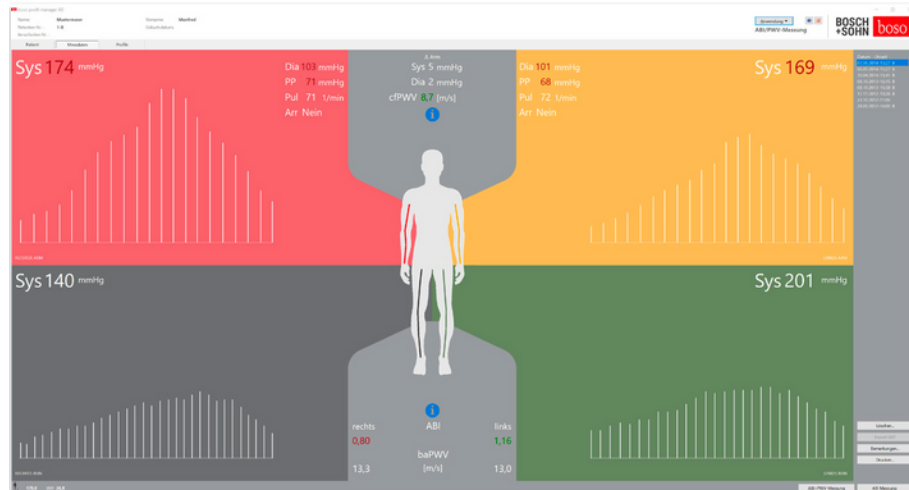

Im Register „Messdaten“ können durchgeführte Messungen betrachtet und neue Messungen durchgeführt werden. Um bereits durchgeführte ABI/PWV-Messungen anzuzeigen, wählen Sie im Feld „Datum-Uhrzeit“ die gewünschte ABI/PWV-Messung. In der Bildschirmdarstellung werden folgende Parameter angezeigt (jeweils für die linke und rechte Körperhälfte):

Sys systolischer Blutdruck des Oberarms, Darstellung rot >140 mmHg

Dia diastolischer Blutdruck des Oberarms, Darstellung rot > 90 mmHg

PP Pulsdruck = Differenz aus Systole – Diastole, Darstellung rot >54 mmHg

Pul Pulswert in 1/min

Arr Angabe, ob während der Messung eine Unregelmäßigkeit der Pulsfrequenz von mehr als 25 % vorlag, Darstellung rot bei Vorliegen einer Arrhythmie

ABI Knöchel-Arm-Index = Quotient aus systolischem Druck der Beinmessung und höherem systolischem Druck der Armmessungen, Darstellung rot bei $ABI < 0,9$ [Vorgabe]

baPWV (optional) gemessene Pulswellengeschwindigkeit Oberarm-Knöchel (brachial-ankle). Da es keinen exakten Grenzwert, sondern nur einen Graubereich von 14 bis 18 m/sec gibt, wird der baPWV-Wert ausschließlich neutral schwarz dargestellt.

Teilweise wird der Grenzwert auch in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und Blutdruck des Patienten individuell festgelegt.

cfPWV_calc (optional) aus der baPWV berechnete Pulswellengeschwindigkeit carotis-femorales, Darstellung rot ≥ 10 m/s (keine Anzeige, wenn beide ABI-Werte $< 0,9$)



Da zur Berechnung der PWV die Körpergröße erforderlich ist, muss diese eingegeben werden.

Sys systolischer Blutdruck am Knöchel

Diff Arm Sys Differenz zwischen den systolischen Werten von linkem Oberarm zu rechtem Oberarm, Darstellung rot > 10 mmHg

Diff Arm Dia Differenz zwischen den diastolischen Werten von linkem Oberarm zu rechtem Oberarm, Darstellung rot > 10 mmHg

Durch Mausklick auf eines der Oszillationsprofile wird das gewählte Profil größer dargestellt. Das Register „Pulslevel über Zeit“ zeigt den Oszillationsverlauf über der Zeitachse. Das Register „Pulslevel über Manschettendruck“ zeigt den Oszillationsverlauf über den Manschettendruck.

3.2.1 Schaltfläche „Löschen ...“


Bereits durchgeführte Messungen werden unwiderruflich gelöscht.

3.2.2 Schaltfläche „Export GDT“

Manuelle Erzeugung der GDT-Export-Datei. Nur verfügbar bei vorherigem GDT-Import des aktiven Patienten.

3.2.3 Schaltfläche „Bemerkungen...“

Einer Messung kann eine Bemerkung durch Mausklick (oder über die Schaltfläche) in das Feld „Bemerkung“ hinzugefügt werden.

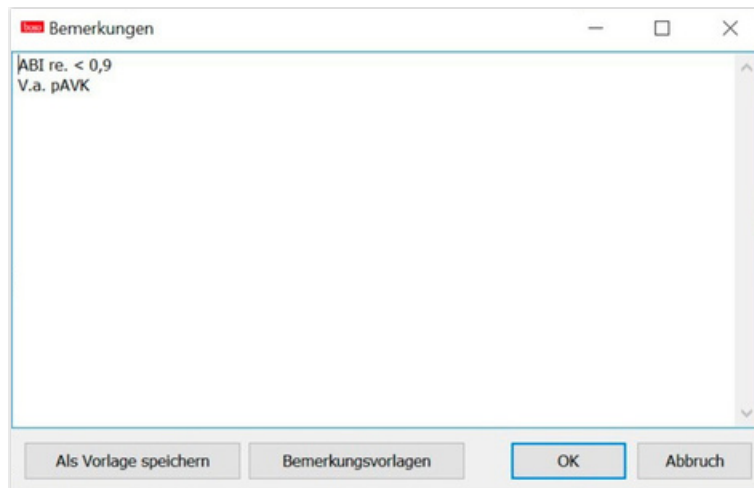

Wiederkehrende Bemerkungen können als Vorlage über die Schaltfläche „Als Vorlage speichern“ abgelegt werden. Gespeicherte Bemerkungsvorlagen können über die Schaltfläche „Bemerkungsvorlagen“ jederzeit einfach in ein Bemerkungsfeld eingefügt werden.

Messungen mit Bemerkungen werden im Feld „Datum-Uhrzeit“ mit einem „B“ gekennzeichnet:

Datum - Uhrzeit
07.05.2014-13:27 B

3.2.4 Schaltfläche „Drucken...“

Erzeugt einen Ausdruck der aktuellen Messung. Wurde in den Druckeinstellungen „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist ABI_pat#_JJJJMMTT_SSMMSS_m.pdf.

pat# = Patientennummer
JJJJMMTT_SSMMSS = Datum und Uhrzeit der Messung
m = Kennbuchstabe für Messung

3.2.5 Schaltfläche „ABI-Messung“

Führt eine Initialisierung des boso ABI-system 100 durch und startet eine neue Messung. Eine laufende Messung kann jederzeit durch die Schaltfläche „Messung abbrechen“ oder die STOP-Taste am Gerät abgebrochen werden. Nach Abschluss der Messung an einer Extremität wird die Schaltfläche „Messung speichern“ aktiv. Die Messung könnte jetzt bereits gespeichert werden (z.B. bei einer fehlenden Extremität).

Nach Abschluss aller Messungen an den vier Extremitäten wird die aktive Schaltfläche „Messung speichern“ grün umrandet. Somit ist die Messung erfolgreich abgeschlossen und kann gespeichert werden.

Tritt während einer Messung ein Fehler auf, so wird dieser im jeweiligen Messfenster angezeigt:

(82) Messfehler/keine Messwertanzeige -> Messung wiederholen

 Wird für den Blutdruck kein Messergebnis angezeigt, Manschette und Schläuche kontrollieren, anschließend eine Wiederholungsmessung durchführen. Wird wiederholt kein Messergebnis angezeigt, kann dies auf eine Durchblutungsstörung oder Mediasklerose hinweisen. Hier sind weiterführende Untersuchungen empfehlenswert.

(83) Manschette anschließen


(89) Systemfehler -> Gerät sollte durch den Service des Herstellers überprüft werden

3.2.6 Schaltfläche „ABI/PWV-Messung“ (optional)

Führt automatisch eine PWV-Messung 10 Sekunden nach Abschluss der unter 3.2.5 beschriebenen ABI-Messung durch.


Nach Abschluss der PWV-Messung wird die Schaltfläche „Messung speichern“ grün umrandet. Somit ist die PWV-Messung erfolgreich abgeschlossen und kann gespeichert werden.

3.3 Register „Profile“

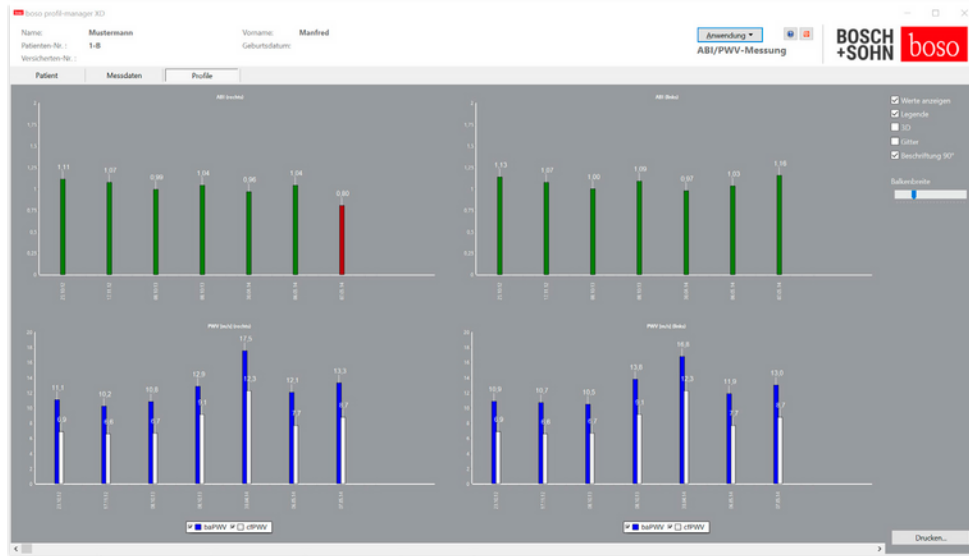

Im Register „Profile“ werden die (optionalen) ABI/PWV-Werte aller Messungen grafisch als Balken dargestellt. Die ABI-Farbdarstellung entspricht der Einstellung unter „Beurteilung“ (rot: ABI < 0,9).

Die Profildarstellung kann optisch durch verschiedene Parameter angepasst werden:

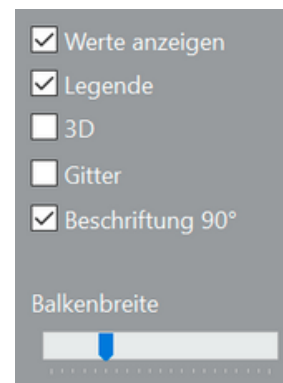

Werte anzeigen (Standard): ABI-Werte werden über den Balken angezeigt.

Legende: Die Legende zu den Messwerten wird im Diagramm angezeigt.

3D: Die Balken werden in 3D-Optik dargestellt.

Gitter: In das Koordinatensystem werden Gitterlinien eingezeichnet.

Beschriftung 90°: Die Beschriftung der x-Achse wird um 90° gedreht.


3.3.1 Schaltfläche „Drucken...“

Erzeugt einen Ausdruck der Profildarstellung. Wurde in den Druckeinstellungen „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist ABI_pat#_p.pdf. pat# = Patientennummer p =

Kennbuchstabe für Profil


3.4 Schaltfläche „Einstellungen“ im Register „Patient“

3.4.1 Unterregister „Arzt“

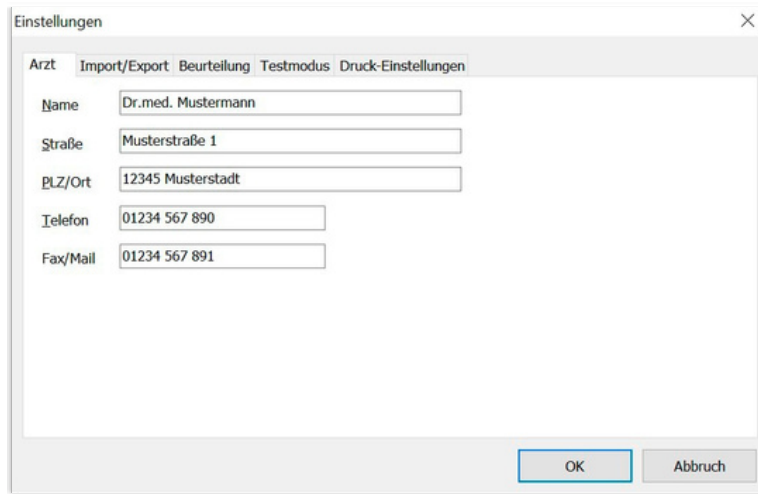

Im Unterregister „Arzt“ erfolgt die Eingabe der persönlichen Daten des behandelnden Arztes als Basis für die Fußzeile im Ausdruck.

3.4.2 Unterregister „Import/Export“

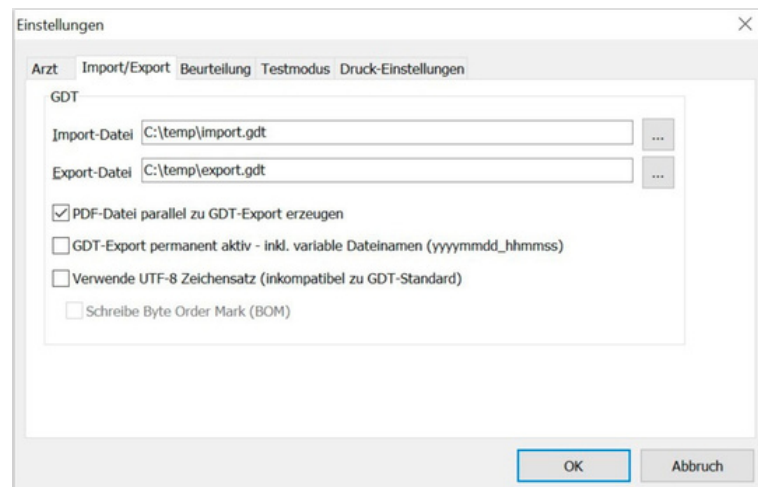

Bei Verwendung einer Praxis-EDV, die die GDT-Schnittstelle unterstützt, werden hier die Pfad- und Dateinamen für die Export- bzw. Import- Datei festgelegt. Über die Schaltflächen neben den Eingabefeldern für Import- und Export-Datei haben Sie direkt Zugriff auf die Verzeichnis- struktur von Windows.

Beispiel: c:\prax_edv\import.gdt

Import-Datei = Export-Datei der Praxis-EDV

Export-Datei = Import-Datei der Praxis-EDV

Der GDT-Import erfolgt automatisch beim Programmstart oder manuell durch Betätigung der Schaltfläche „Export/Import -> Import GDT“, wenn eine gültige GDT-Import-Datei im vorgegebenen Verzeichnis vorhanden ist.

Der GDT-Export erfolgt nur, wenn der von der Praxis-EDV importierte Patient aktiv ist. Der Export erfolgt automatisch beim Beenden des Programms (sofern während der aktuellen Programmsitzung Messdaten vom Gerät eingelesen wurden) oder manuell jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche „Export GDT“ im Register „Messdaten“.



Der Datenexport ist deaktiviert, wenn der Patient nach dem automatischen Import gewechselt wurde. Er wird erneut aktiviert, wenn dieser Patient wieder gewählt wird. Der Datenexport ist ebenfalls deaktiviert, wenn zuvor kein Import erfolgt ist.

Für bestimmte Anwendungen (Anbindung an HL7 im Krankenhausbetrieb) kann es notwendig werden, den GDT-Export permanent zu aktivieren und die Export-Datei variabel zu benennen (Export.gdt -> yyyymmdd_hhmmss.gdt). Hierfür ist die Option „GDT-Export permanent aktiv – inkl. variable Dateinamen“ zu aktivieren.



Bei Wahl dieser Option in der Praxisumgebung ist besonders darauf zu achten, dass der aktive Patient der Praxis-EDV identisch mit dem exportierten Patienten ist.

Durch die aktive Option „PDF-Datei parallel zu GDT-Export erzeugen“ wird mit dem GDT-Export eine PDF-Datei erzeugt. Um auch Sonderzeichen aus bestimmten Fremdsprachen im GDT darstellen zu können, muss der Zeichensatz UTF8 verwendet werden. Dies entspricht nicht dem GDT-Standard und muss über die Option „Verwende UTF-8 Zeichensatz“ gezielt ausgewählt werden.

3.4.3 Unterregister „Beurteilung“

Wert	Beurteilung
> 0,90	Keine PAVK
> 0,75	Leichte PAVK
> 0,50	Mittelschwere PAVK
< 0,50	Schwere PAVK

Anpassung der Grenzwerte zur Einstufung des ABI-Wertes.


 Änderungen werden erst nach Neustart des Programms wirksam.

3.4.4 Unterregister „Testmodus“

Über die Schaltfläche „Drucksensoren A“ bzw. „Drucksensoren B“ wird der Testmodus aktiviert. Der Testmodus wird über die Schaltfläche „Test beenden“ wieder beendet. Diese Funktion wird z.B. für die Druckprüfung im Rahmen von messtechnischen Kontrollen benötigt. (optional) Die Funktionsprüfung des Geräts mit der Option „PWV“ erfordert spezielle Simulatoren und muss beim Hersteller durchgeführt werden.

 Die Aktivierung der „Drucksensoren B“ ist erst ab Seriennummer 466 20000 möglich.

3.4.5 Unterregister „Druck-Einstellungen“

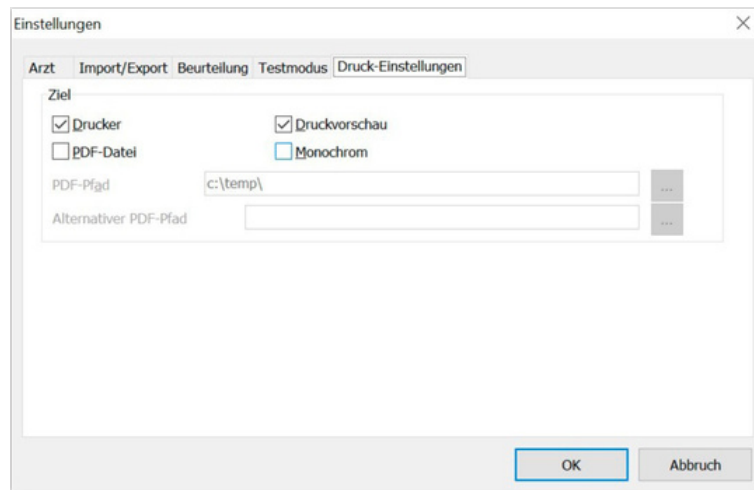

Im Register „Druck-Einstellungen“ legen Sie fest, ob der Ausdruck in Papierform, als Bildschirmdruck und/oder als PDF-Dokument ausgegeben werden soll, nachdem die jeweiligen Schaltflächen [Drucken...] im Programmablauf betätigt wurden.

Wird „Drucker“ ausgewählt, so wird bei Betätigung der Schaltflächen [Drucken...] im Programmablauf der Windows Druckdialog angezeigt.

Wird zusätzlich „Druckvorschau“ ausgewählt, so wird vor dem Druck die Druckvorschau angezeigt.

Wird „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist anwendungsspezifisch aufgebaut und wird in den einzelnen Anwendungen näher beschrieben.



Mindestens ein Medium „Drucker“ oder „PDF-Datei“ muss gewählt werden.

Wird die Option „Monochrom“ ausgewählt, so erfolgt der Ausdruck einfarbig.

3.4.6 Fehlercodes

(82) Messfehler/keine Messwertanzeige -> Messung wiederholen Wird

für den Blutdruck kein Messergebnis angezeigt, Manschette und Schläuche kontrollieren, anschließend eine Wiederholungsmessung durchführen. Wird wiederholt kein Messergebnis angezeigt, kann dies auf eine Durchblutungsstörung oder Mediasklerose hinweisen. Hier sind weiterführende Untersuchungen empfehlenswert. (83) Manschette anschließen (89) Systemfehler -> Gerät sollte durch den Service des Herstellers überprüft werden



Achtung: Maximale Messdauer wurde überschritten.



Diese Meldung wird durch eine zu lange Messdauer ausgelöst, diese darf maximal 150 Sekunden betragen. Eine falsch und/oder zu locker angelegte Manschette kann die Messdauer verlängern und/oder zu einem Nachpumpen führen. Ebenso ist darauf zu achten, dass die Manschette nicht direkt auf der Liege liegt. Dies kann zu ruckartigem Rutschen der Manschetten auf der Liege führen, was wiederum zum Nachpumpen führt. Eine Schutzunterlage aus Papier kann hier Abhilfe schaffen.

Trennen Sie das Gerät 5 Sekunden vom Netz, um das Problem zu beheben.

Sollte das Problem nach dem Start einer neuen Messung sofort wieder auftreten, senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung an den Hersteller.

4 Anwendung „24h-Messung“

4.1 Register „Patient“

Siehe Abschnitt „2.1 Register Patient, gültig für alle Anwendungen“. Schaltfläche „Einstellungen“ siehe Kapitel 4.7.

4.2 Register „Messdaten“

Patient	Messdaten	Profil Typ/Die	Profil MAP	Profil PP	Status
1	10.03.2011 - 11.03.2011	138	88	93	43
2	10.03.2011 - 11.03.2011	133	78	88	43
3	10.03.2011 - 11.03.2011	137	77	88	48
4	10.03.2011 - 11.03.2011	138	81	96	39
5	10.03.2011 - 11.03.2011	135	88	88	47
6	10.03.2011 - 11.03.2011	133	75	88	47
7	10.03.2011 - 11.03.2011	132	80	93	43
8	10.03.2011 - 11.03.2011	133	84	96	47
9	10.03.2011 - 11.03.2011	134	78	93	46
10	10.03.2011 - 11.03.2011	134	82	96	43
11	10.03.2011 - 11.03.2011	133	75	88	43
12	10.03.2011 - 11.03.2011	136	87	100	39
13	10.03.2011 - 11.03.2011	138	95	107	43
14	10.03.2011 - 11.03.2011	137	77	88	39
15	10.03.2011 - 11.03.2011	138	78	83	48
16	10.03.2011 - 11.03.2011	137	83	111	34
17	10.03.2011 - 11.03.2011	135	88	88	39
18	10.03.2011 - 11.03.2011	139	83	96	38
19	10.03.2011 - 11.03.2011	137	76	93	33
20	10.03.2011 - 11.03.2011	135	77	88	38
21	10.03.2011 - 11.03.2011	138	83	73	43
22	10.03.2011 - 11.03.2011	137	73	88	38
23	10.03.2011 - 11.03.2011	135	78	96	46
24	10.03.2011 - 11.03.2011	133	84	75	39
25	10.03.2011 - 11.03.2011	135	86	73	45
26	10.03.2011 - 11.03.2011	132	74	96	38
27	10.03.2011 - 11.03.2011	137	73	88	35
28	10.03.2011 - 11.03.2011	137	81	73	36
29	10.03.2011 - 11.03.2011	138	87	73	43
30	10.03.2011 - 11.03.2011	134	78	68	45
31	10.03.2011 - 11.03.2011	138	83	68	39
32	10.03.2011 - 11.03.2011	135	85	75	48
33	10.03.2011 - 11.03.2011	134	87	73	47
34	10.03.2011 - 11.03.2011	133	88	85	53
35	10.03.2011 - 11.03.2011	132	89	73	43
36	10.03.2011 - 11.03.2011	134	83	88	43
37	10.03.2011 - 11.03.2011	137	86	88	39

Hier werden alle bisher eingelesenen Messungen zum ausgewählten Patienten angezeigt.

Das 24h-Messgerät wird hier initialisiert und Daten vom Gerät ausgelesen.

Um in dieses Register zu wechseln, muss ein Patient ausgewählt sein.

Das Programm startet patientenneutral. Ohne manuell ausgewählten Patienten oder automatisch über die GDT-Schnittstelle importierten Patienten erscheint eine Hilfsmaske.

Neben dem Zeitraum wird das Blutdruckmessgerät, mit dem die

Messreihe

durchgeführt wurde, angezeigt.

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum.

Zeitraum	Gerät
10.03.2011 - 11.03.2011	TM-2430 B
15.04.2008 - 16.04.2008	TM-2430

	Datum	SYS	DIA	PUL	MAP	PP/Arr.	Exclude	S	°C	hPa	Osc.	Bemerkung
1	Do, 10.03.2011 - 09:24	130	89	83	103	41	☒					
2	Do, 10.03.2011 - 09:30	150	88	81	109	62	☐					
3	Do, 10.03.2011 - 09:46	121	78	103	92	43	☐					
4	Do, 10.03.2011 - 10:00	117	77	103	90	40	☐					
5	Do, 10.03.2011 - 10:16	120	81	96	94	39	☐					
6	Do, 10.03.2011 - 10:30	115	88	107	97	27	☐					
7	Do, 10.03.2011 - 10:45	112	75	90	87	37	☐					
8	Do, 10.03.2011 - 11:00	132	90	93	104	42	☐					
9	Do, 10.03.2011 - 11:15	131	84	96	100	47	☐					
10	Do, 10.03.2011 - 11:30	124	78	76	93	46	☐					
11	Do, 10.03.2011 - 11:45	124	82	76	96	42	☐					
12	Do, 10.03.2011 - 12:00	123	75	88	91	48	☐					
13	Do, 10.03.2011 - 12:15	146	87	120	107	59	☐					
14	Do, 10.03.2011 - 12:30	138	95	107	109	43	☐					
15	Do, 10.03.2011 - 12:45	127	77	90	94	50	☐					
16	Do, 10.03.2011 - 13:00	126	78	83	94	48	☐					

Die Spalten haben folgenden Inhalt:

- 1: laufende Nummerierung der Messungen
- 2: Datum und Uhrzeit der Messung
- 3: SYS = systolischer Blutdruckwert (peripher)
- 4: DIA = diastolischer Blutdruckwert (peripher)
- 5: PUL = Pulswert
- 6: MAP = mittlerer arterieller Blutdruckwert, berechnet aus DIA
+ 1/3 Pulsdruck (peripher)
- 7: PP = Pulsdruck (SYS – DIA)
- 8: Arrhythmie
- 9: Exclude = Markierung entfernt die Messung von der Auswertung
in Profil und Statistik
- 10: S= Messung während der Nachtphase
- 11: Temperatur in °C
- 12: relativer Luftdruck in hPa
- 13: Druckverlauf während der Messung
- 14: Bemerkung. Um einer Messung eine Bemerkung hinzuzufügen, doppelklicken Sie in die Zeile der Messung. Das Eingabefeld für Bemerkungen wird geöffnet

Bemerkung bearbeiten

Datum

10.03.2011

Zeit

09:24

Sys

130

Dia

89

Puls

83

MAP

103

PP

41

Bemerkung

OK

Abbruch

4.2.1 Schaltfläche „Zeitraum löschen ...“

Unwiderrufliches Löschen einer kompletten Messreihe.

4.2.2 Schaltfläche „Bemerkungen...“

Bemerkung zu einer kompletten Messreihe.

4.2.3 Schaltfläche „Export GDT“

Manuelle Erzeugung der GDT-Exportdatei. Nur verfügbar bei vorherigem GDT-Import des aktiven Patienten.

4.2.4 Schaltfläche „Manuelle Einträge...“

Zusätzliche Messwerte können hier der aktiven Messreihe hinzugefügt, bearbeitet oder wieder gelöscht werden.

4.2.5 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck der Messwertliste.

Wurde in den Druck-Einstellungen (Kapitel 4.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist tm_pat#_JJJJMMTT_m.pdf.

pat# = Patientenummer
JJJJMMTT = Datum der Messung
m = Kennbuchstabe für Messung

4.2.6 Schaltfläche „Programmieren...“

TM-2450 Einstellungen

Patient **Mustermann, Manfred**

Modus

- ☒ Standard Perioden/Intervalle
- ☐ Schlafaste
- ☐ Programmierbare Perioden/Intervalle

Datum/Uhrzeit

Aktuelle Systemzeit 25.01.2021 17:10

TM-2450 Zeit 25.01.2021 17:10

Intervalle

Tag Nacht

Startzeit 7 :00 22 :00

Intervall 15 30

Aktionen

PC-Zeit übernehmen ☒

Messwert anzeigen ☒

Lizenzcode 0

Diverses

Maximaldruck 300 mmHg

OK Abbruch

Das 24h-Messgerät besitzt die Möglichkeit, mit einer eindeutigen, max. 10-stelligen Patientennummer programmiert zu werden. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass beim Auslesen der Messdaten diese direkt dem richtigen Patienten zugeordnet werden können. Das 24h-Messgerät muss programmiert werden, bevor es einem Patienten angelegt wird. Ansonsten bekommen Sie beim Auslesen der Messwerte folgende Fehlermeldung.



Diese Fehlermeldung müssen Sie mit "OK" bestätigen und den richtigen Patienten in der neu angezeigten Patientenliste auswählen.

Im Programmierfenster wird automatisch der aktuelle Patient übernommen und dem Gerät die Patientennummer zugeordnet (softwareseitige Generierung einer numerischen Kennung, somit können im boso profilmanager XD auch alphanumerische Patientennummern geführt werden).

Im Feld „Maximaldruck“ können Sie einen maximalen Aufpumpdruck definieren. Die Aufpumphöhe des Blutdruckmessgeräts wird durch den hier eingegebenen Wert begrenzt.



Ist der systolische Blutdruckwert des Patienten ähnlich diesem Wert bzw. darüber, kann keine Blutdruckmessung durchgeführt werden. Das Gerät liefert dann eine Fehlermeldung. TM-2430



Geräte mit Seriennummer < SN M 0713550 besitzen die Möglichkeit der programmierbaren Patientennummer und des Maximaldrucks nicht.

Es können drei verschiedene Modi programmiert werden

Standard Perioden/Intervalle

Wird dieser Modus gewählt, misst das Gerät in der Zeit von 07:00 bis 22:00 Uhr alle 15 Minuten und von 22:00 bis 07:00 Uhr alle 30 Minuten.

Schlafaste

In diesem Modus hat der Patient die Möglichkeit, durch Drücken der **AUTO-Taste** das Messgerät selbst zu bestimmen, ab wann das Nacht- bzw. Tagintervall beginnen soll. Diese Programmierung bietet den Vorteil, dass die Messintervalle individuell auf den Patienten abgestimmt werden können. Zum Beispiel bei Patienten mit unregelmäßigem Schlafrhythmus. Die Intervalldauer beträgt im Tagintervall 15 Minuten und im Nachtintervall 30 Minuten.

Programmierbare Perioden/Intervalle

In diesem Modus können zwei frei wählbare Intervalle und Perioden programmiert werden. Die Intervalldauer ist individuell einstellbar (5/10/15/20/30/60/120 Minuten).

4.3 Register „Profil Sys/Dia“

Messwert anzeigen

Durch Aktivieren bzw. Deaktivieren kann hier ausgewählt werden, ob der Messwert nach der Messung angezeigt werden soll oder nicht.

PC-Zeit übernehmen



Durch Aktivieren werden die auf Ihrem PC eingestellten Datum- und Zeiteinstellungen übernommen.

4.2.7 Schaltfläche „Messwerte auslesen...“

Vor Betätigen der Schaltfläche „Messwerte auslesen“ das Messgerät mit dem PC-Verbindungskabel verbinden. Die Messdaten werden anschließend vom angeschlossenen Messgerät übertragen.

Im Anschluss an die Datenübertragung können die Intervallgrenzen individuell über die Schaltfläche „Ändern“ an den tatsächlichen Tagesablauf des Patienten angepasst werden.

Der Messwertspeicher des Geräts sollte durch Betätigen der Schaltfläche „Ja“ gelöscht werden.

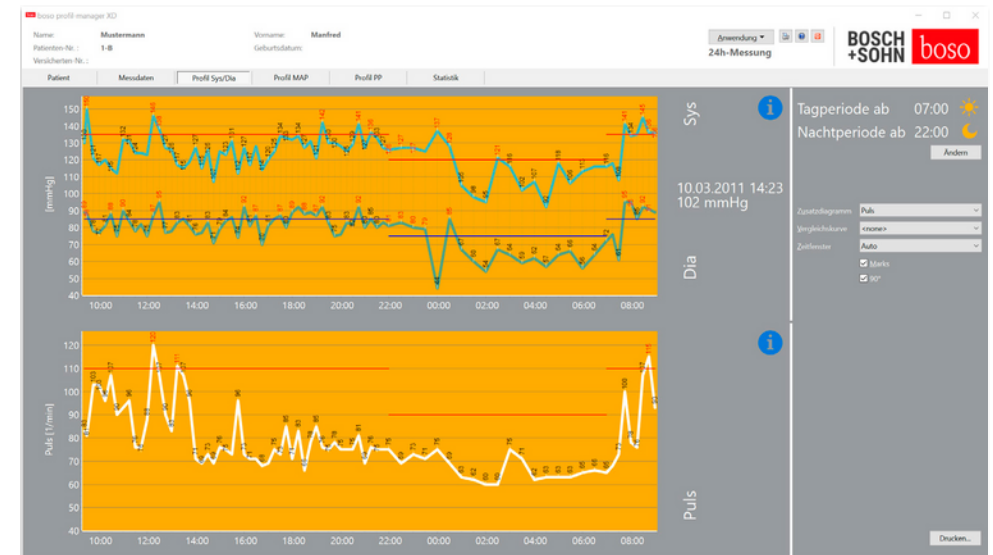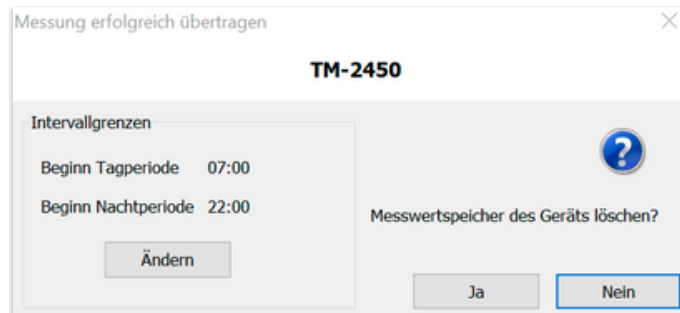

Hier wird der Blutdruckverlauf angezeigt. Um nähere Informationen zu einzelnen Messwerten zu bekommen, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Messung. Am linken oberen Rand des Diagramms werden das Datum, die Uhrzeit und der Messwert angezeigt. Um Bereiche der Kurve detaillierter darzustellen, ist eine Zoomfunktion verfügbar. Mit gedrückter linker Maustaste wird der Zoombereich gewählt, indem innerhalb des Diagramms die Maus von links unten nach rechts oben bewegt wird. Die Zoomfunktion wird aufgehoben, indem innerhalb des Diagramms die Maus mit gedrückter linker Maustaste von rechts oben nach links unten geführt wird.

4.3.1 Schaltfläche „Ändern“

Die Intervallgrenzen können individuell über die Schaltfläche „Ändern“ an den tatsächlichen Tagesablauf des Patienten angepasst werden.

4.4 Register „Profil MAP“

4.3.2 Auswahlfeld „Vergleichskurve“

Hier können die Daten einer zusätzlichen 24h-Messung in die aktuelle Grafik eingelesen und der Verlauf beider Messreihen direkt verglichen werden.

4.3.3 Auswahlfeld „Zeitfenster“

Auswahl, über welchen Zeitbereich die Messungen angezeigt werden. Zur Wahl stehen Auto und Tag. Standardmäßig ist die Einstellung „Auto“ gewählt. Hierbei wird das Zeitfenster von der ersten bis zur letzten Messung skaliert.

Bei der Einstellung „Tag“ werden exakt 24 Stunden dargestellt.


Durch Drücken der rechten Maustaste im Diagramm kann die Grafik mit der Maus horizontal verschoben werden.

4.3.4 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck des Profils SYS/DIA und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 4.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist tm_pat#_JJJJMMTT_sys.pdf.

pat# = Patientennummer
JJJJMMTT = Datum der Messung
sys = Kennbuchstabe für SYS/DIA

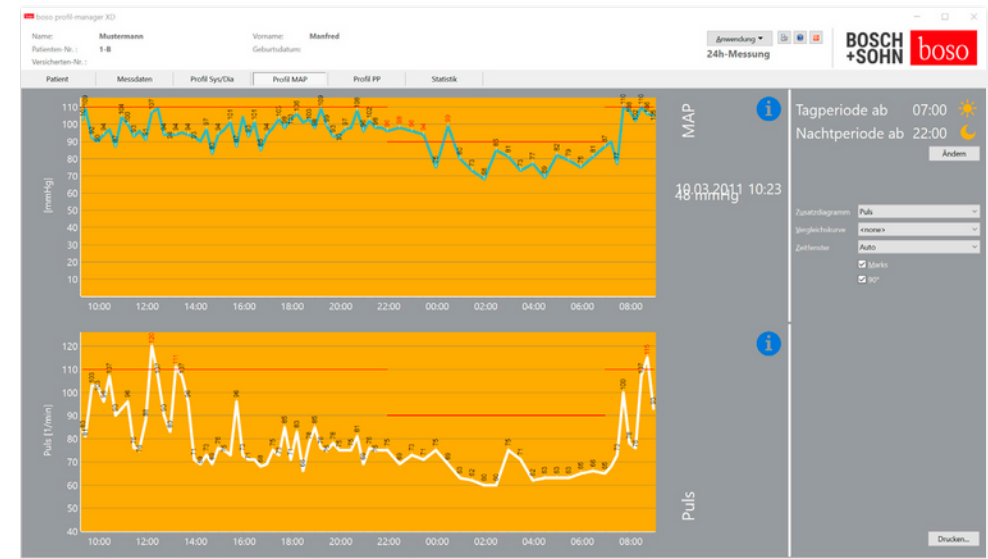

Hier wird der Verlauf des berechneten mittleren arteriellen Blutdrucks angezeigt (MAP = Diastole DIA + 1/3 Pulsdruck PP).

Um nähere Informationen zu einzelnen Messwerten zu bekommen, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Messung. Am linken oberen Rand des Diagramms werden das Datum, die Uhrzeit und der Messwert angezeigt. Um Bereiche der Kurve detaillierter darzustellen, ist eine Zoomfunktion verfügbar. Mit gedrückter linker Maustaste wird der Zoombereich gewählt,

indem innerhalb des Diagramms die Maus von links unten nach rechts oben bewegt wird. Die Zoomfunktion wird aufgehoben, indem innerhalb des Diagramms die Maus mit gedrückter linker Maustaste von rechts oben nach links unten geführt wird.

4.4.1 Schaltfläche „Ändern“

Die Intervallgrenzen können individuell über die Schaltfläche „Ändern“ an den tatsächlichen Tagesablauf des Patienten angepasst werden.

4.5 Register „Profil PP“

4.4.2 Auswahlfeld „Vergleichskurve“

Hier können die Daten einer zusätzlichen 24h-Messung in die aktuelle Grafik eingelesen und der Verlauf beider Messreihen direkt verglichen werden.

4.4.3 Auswahlfeld „Zeitfenster“

Auswahl, über welchen Zeitbereich die Messungen angezeigt werden. Zur Wahl stehen Auto und Tag. Standardmäßig ist die Einstellung „Auto“ gewählt. Hierbei wird das Zeitfenster von der ersten bis zur letzten Messung skaliert.

Bei der Einstellung „Tag“ werden exakt 24 Stunden dargestellt.

Durch Drücken der rechten Maustaste im Diagramm kann die Grafik mit der Maus horizontal verschoben werden.

4.4.4 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck des Profils MAP und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 4.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist tm_pat#_JJJJMMTT_map.pdf.

pat# = Patientennummer
JJJJMMTT = Datum der Messung
map = Kennbuchstabe für MAP



Hier wird der Verlauf des berechneten Pulsdrucks angezeigt (PP = SYS – DIA).

Um nähere Informationen zu einzelnen Messwerten zu bekommen, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Messung. Am linken oberen Rand des Diagramms werden das Datum, die Uhrzeit und der Messwert angezeigt. Um Bereiche der Kurve detaillierter darzustellen, ist eine Zoomfunktion verfügbar. Mit gedrückter linker Maustaste wird der Zoombereich

gewählt, indem innerhalb des Diagramms die Maus von links unten nach rechts oben bewegt wird. Die Zoomfunktion wird aufgehoben, indem innerhalb des Diagramms die Maus mit gedrückter linker Maustaste von rechts oben nach links unten geführt wird.

4.5.1 Schaltfläche „Ändern“

Die Intervallgrenzen können individuell über die Schaltfläche „Ändern“ an den tatsächlichen Tagesablauf des Patienten angepasst werden.

4.6 Register „Statistik“

4.5.2 Auswahlfeld „Vergleichskurve“

Hier können die Daten einer zusätzlichen 24h-Messung in die aktuelle Grafik eingelesen und der Verlauf beider Messreihen direkt verglichen werden.

4.5.3 Auswahlfeld „Zeitfenster“

Auswahl, über welchen Zeitbereich die Messungen angezeigt werden. Zur Wahl stehen Auto und Tag. Standardmäßig ist die Einstellung „Auto“ gewählt. Hierbei wird das Zeitfenster von der ersten bis zur letzten Messung skaliert.

Bei der Einstellung „Tag“ werden exakt 24 Stunden dargestellt.

Durch Drücken der rechten Maustaste im Diagramm kann die Grafik mit der Maus horizontal verschoben werden.

4.5.4 Schaltfläche „Drucken...“


Ausdruck des Pulsdruckprofils und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 4.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist tm_pat#_JJJJMMTT_pp.pdf.

Patientennummer
pat# =

JJJJMMTT = Datum der Messung

pp = Kennbuchstabe für Pulsdruck

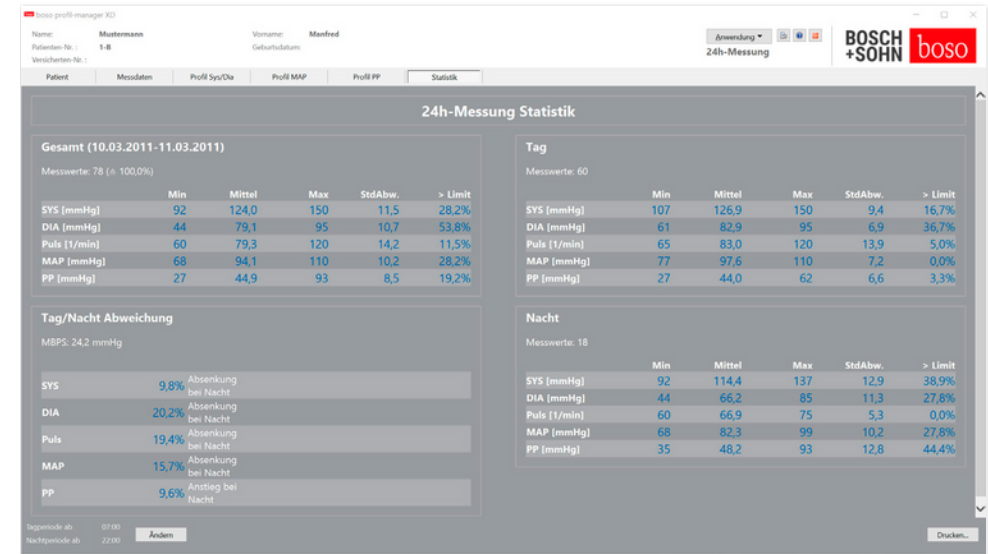

Es werden die Messungen des Gesamt-, Tag- und Nacht-Zeitraums getrennt ausgewertet. Die Gesamtsumme der Messwerte in den einzelnen Zeiträumen werden angezeigt. In den einzelnen Spalten werden folgende Werte ausgegeben:

Min: kleinster Wert im entsprechenden Intervall

Mittel: arithmetischer Mittelwert im entsprechenden Intervall

Max: größter Wert im entsprechenden Intervall

StdAbw.: Standardabweichung im entsprechenden Intervall

> Limit: prozentualer Anteil über den festgelegten Grenzwerten

MBPS: morning blood pressure surge
Der MBPS ist ein Indikator für den Blutdruckanstieg nach dem Aufstehen. MBPS = MwSysTag - MwSysNacht

Mittel Tag = Mittelwert der systolischen Werte aus den ersten zwei Stunden des Tagintervalls

Mittel Nacht = Mittelwert der 3 systolischen Werte um den niedrigsten systolischen Wert im Nachtintervall (ein Wert vor dem niedrigsten Wert, der niedrigste Wert selbst und ein Wert nach dem niedrigsten Wert)

Prozentuale(r) Anstieg/Absenkung bei Nacht wird angezeigt.

4.6.1 Schaltfläche „Ändern“

Die Intervallgrenzen können individuell über die Schaltfläche „Ändern“ an den tatsächlichen Tagesablauf des Patienten angepasst werden.

4.6.2 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck des Profils SYS/DIA und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 4.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist tm_pat#_JJJJMMTT_sys.pdf.

pat# = Patientennummer

JJJJMMTT = Datum der Messung

sys = Kennbuchstabe für SYS/DIA

4.7 Schaltfläche „Einstellungen...“ im Register „Patient“

4.7.1 Unterregister „Arzt“


The screenshot shows a software window titled "Einstellungen" (Settings) with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with the following tabs: "Arzt", "Import/Export", "Druck-Einstellungen", "Schnittstelle", "Grenzwerte", and "Profil". The "Arzt" tab is currently selected. It contains a form with the following fields and values:

Field	Value
Name	Dr.med. Mustermann
Straße	Musterstraße 1
PLZ/Ort	12345 Musterstadt
Telefon	01234 567 890
Fax/Mail	01234 567 891

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbruch" (Cancel).

Im Unterregister „Arzt“ erfolgt die Eingabe der persönlichen Daten des behandelnden Arztes als Basis für die Fußzeile im Ausdruck.

4.7.2 Unterregister „Import/Export“

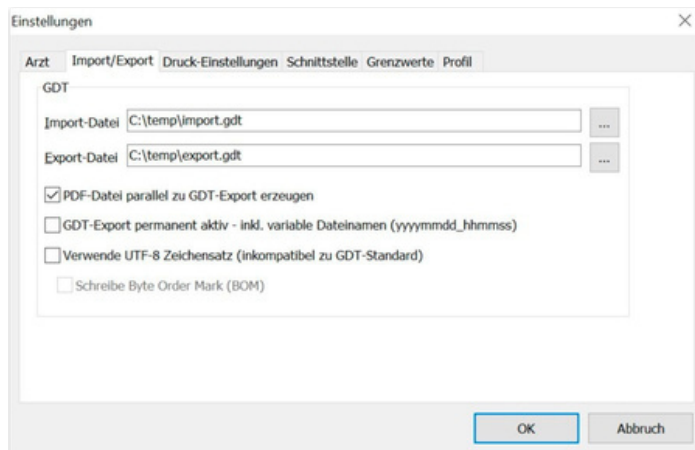

Bei Verwendung einer Praxis-EDV, die die GDT-Schnittstelle unterstützt, werden hier die Pfad- und Dateinamen für die Export bzw. Import-Datei festgelegt. Über die Schaltflächen neben den Eingabefeldern für Import- und Export-Datei haben Sie Zugriff auf die Verzeichnisstruktur von Windows.

Beispiel: c:\prax_edv\import.gdt

Import-Datei = Export-Datei der Praxis-EDV
Export-Datei = Import-Datei der Praxis-EDV


Der GDT-Import erfolgt automatisch beim Programmstart oder manuell durch Bestätigung der Schaltfläche „Export/Import -> Import GDT“, wenn eine gültige GDT-Importdatei im vorgegebenen Verzeichnis vorhanden ist. Der GDT-Export erfolgt nur, wenn der von der Praxis-EDV importierte Patient aktiv ist. Der Export erfolgt automatisch beim Beenden des Programms (sofern während der aktuellen Programmsitzung Messdaten vom Gerät eingelesen wurden) oder manuell jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche „Export GDT“ im Register „Messdaten“.



Der Datenexport ist deaktiviert, wenn der Patient nach dem automatischen Import gewechselt wurde. Er wird erneut aktiviert, wenn dieser Patient wieder gewählt wird. Der Datenexport ist ebenfalls deaktiviert, wenn zuvor kein Import erfolgt ist.

Weitere Hinweise zu den verfügbaren Optionen „PDF-Datei parallel zu GDT-Export erzeugen“, „GDT-Export permanent aktiv“ und „Verwende UTF-8 Zeichensatz“ siehe 3.4.2.

4.7.3 Unterregister „Druck-Einstellungen“

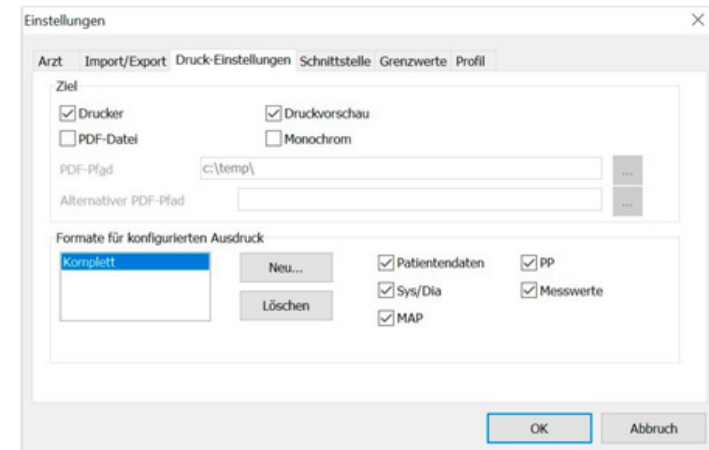

Im Register „Druck-Einstellungen“ legen Sie fest, ob der Ausdruck in Papierform, als Bildschirmdruck und/oder als PDF-Dokument ausgegeben werden soll, nachdem die jeweiligen Schaltflächen [Drucken...] im Programmablauf betätigt wurden.


Wird „Drucker“ ausgewählt, so wird bei Betätigung der Schaltflächen [Drucken...] im Programmablauf der Windows Druckdialog angezeigt. Wird zusätzlich „Druckvorschau“ ausgewählt, so wird vor dem Druck die Druckvorschau angezeigt.

Wird „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist anwendungsspezifisch aufgebaut und wird in den einzelnen Anwendungen näher beschrieben.



Mindestens ein Medium „Drucker“ oder „PDF-Datei“ muss gewählt werden.

Wird die Option „Monochrom“ ausgewählt, so erfolgt der Ausdruck einfarbig. Durch Betätigung des Drucker-Symbols „Konfigurierter Ausdruck“ wird das hier konfigurierte Ausdruckformat verwendet und nur die hier gewählten Seiten gedruckt.

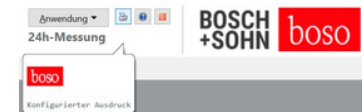

4.7.4 Unterregister „Schnittstelle“

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Schnittstelle' (Interface) tab selected. The window has a title bar with 'Einstellungen' and a close button. The tabs are 'Arzt', 'Import/Export', 'Druck-Einstellungen', 'Schnittstelle', 'Grenzwerte', and 'Profil'. The 'Schnittstelle' tab contains the following settings:

- Automatische Port-Auswahl:** ☒ TM-2430/TM-2450, ☐ TM-2430 (USB-Kabel)
- Manuelle Port-Auswahl:** COM-Port (dropdown menu)
- Zusatzdaten TM-2450:** ☐ Pulskurve, ☐ Luftdruck/Temperatur, ☒ Aktivität
- TM-2430:** ☐ SN < 0713551

At the bottom are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

Legen Sie hier fest, wie die Verbindung zwischen dem 24h-Messgerät und dem PC hergestellt wird. Bei aktiver Option „Automatische USB-Auswahl“ prüft die Software vor jeder Datenübertragung, an welchem USB-Anschluss ein 24h-Messgerät angeschlossen ist. Sind mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, bitte alle Geräte bis auf das zu verwendende entfernen. Ein entsprechender Warnhinweis erinnert daran. Bei nicht aktiver Option „Automatische USB-Auswahl“ wird der in der Port- Liste gewählte serielle (COM) oder USB-Anschluss zur Datenübertragung verwendet. Geräte älterer Bauart verwenden einen reduzierten Befehlssatz (ohne programmierbare Patientennummer und Maximaldruck). Für TM-2430 Geräte mit Seriennummer < SN M0713551 ist die entsprechende Option zu wählen.

4.7.5 Unterregister „Grenzwerte“


The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Grenzwerte' (Limits) tab selected. The window has a title bar with 'Einstellungen' and a close button. The tabs are 'Arzt', 'Import/Export', 'Druck-Einstellungen', 'Schnittstelle', 'Grenzwerte', and 'Profil'. The 'Grenzwerte' tab contains the following settings:

Gesamt		Tag		Nacht	
SYS	130	SYS Tag	135	Nacht	120
DIA	80	DIA Tag	85	Nacht	75
Puls	100	Puls Tag	110	Nacht	90
MAP	100	MAP Tag	110	Nacht	90
PP	50	PP Tag	55	Nacht	45

At the bottom are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

Um eine individuelle Auswertung zu ermöglichen, können die Grenzwerte für die einzelnen Zeiträume festgelegt werden. Die Einstellung der Grenzwerte für Tag und Nacht beziehen sich auf die festgelegten Intervallzeiten.

4.7.6 Unterregister „Profil“

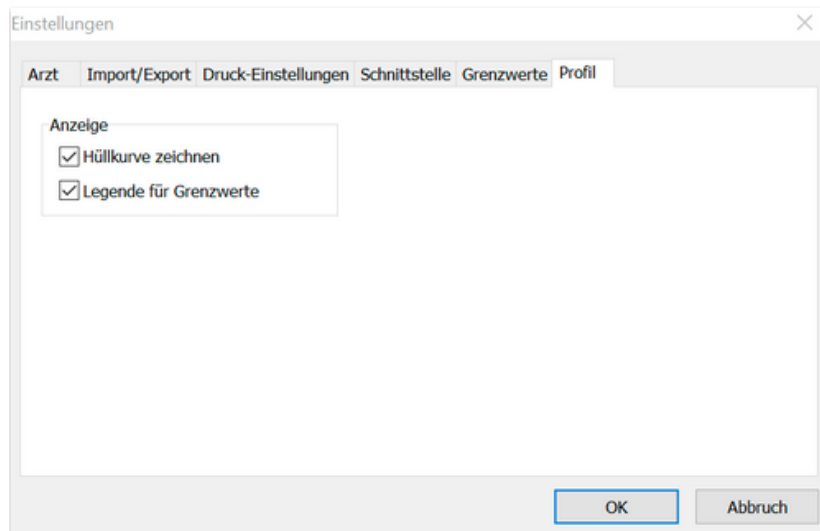


In den Profildarstellungen (Register „Profil Sys/Dia, MAP, PP“) wird standardmäßig eine Hüllkurve (Verbindungsline zwischen den einzelnen Messpunkten) gezeichnet und die Grenzwerte als horizontale Linien dargestellt. Sowohl Hüllkurve als auch Grenzwertlinien können hier ausgeblendet werden.

5 Anwendung „Patientenmessung“

5.1 Register „Patient“

siehe Abschnitt „2.1 Register Patient, gültig für alle Anwendungen“
Schaltfläche „Einstellungen“ siehe Kapitel 5.7.

5.2 Register „Messdaten“

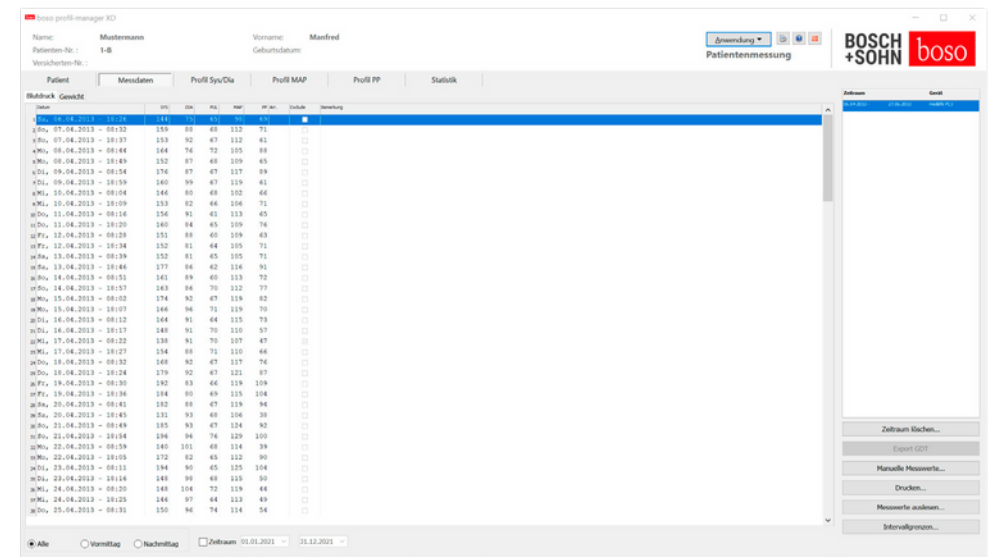

Bei „Blutdruck“ werden sämtliche bisher eingelesene Blutdruckmessungen zum ausgewählten Patienten angezeigt. Neben dem Zeitraum wird das Blutdruckmessgerät, mit dem die Messreihe durchgeführt wurde, angezeigt. Bei „Gewicht“ werden sämtliche aus der bosso App übertragene Gewichtswerte angezeigt.

boso profil-manager XD

Name: **Mustermann** Vorname: **Manfred**
 Patienten-Nr.: **1-B** Geburtsdatum:

Versicherten-Nr.:

Patient Messdaten Profil Sys/Dia Profil MAP Profil PP Statistik

Datum	Gewicht	SYS	DIA	PUL	MAP	PP	Arr.	Exclude	Bemerkung
1 Sa, 06.04.2013 - 18:26		144	75	65	98	69		☒	
2 So, 07.04.2013 - 08:32		159	88	68	112	71		☐	
3 So, 07.04.2013 - 18:37		153	92	67	112	61		☐	
4 Mo, 08.04.2013 - 08:44		164	76	72	105	88		☐	
5 Mo, 08.04.2013 - 18:49		152	87	68	109	65		☐	
6 Di, 09.04.2013 - 08:54		176	87	67	117	89		☐	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Die Spalten haben folgenden Inhalt: 1: laufende Nummerierung der

Messungen

2: Datum und Uhrzeit der Messung

3: SYS = systolischer Blutdruckwert

4: DIA = diastolischer Blutdruckwert

5: PUL = Pulswert

6: MAP = mittlerer arterieller Blutdruckwert (aus DIA + 1/3 Pulsdruck)

7: PP = Pulsdruck (SYS – DIA)

8: Arr. = Arrhythmieanzeige

9: Exclude = Markierung entfernt die Messung von der Auswertung in Profil und Statistik

10: Bemerkung. Um einer Messung eine Bemerkung hinzuzufügen, doppelklicken Sie in die Zeile der Messung. Das Eingabefeld für Bemerkungen wird geöffnet

Bemerkung bearbeiten

Datum: 06.04.2013 Zeit: 18:26

Sys: 144
 Dia: 75
 Puls: 65
 MAP: 98
 PP: 69

Bemerkung

OK Abbruch

5.2.1 Schaltfläche „Zeitraum löschen...“

Unwiderrufliches Löschen einer kompletten Messreihe.

5.2.2 Schaltfläche „Export GDT“

Manuelle Erzeugung der GDT-Export-Datei. Nur verfügbar bei vorherigem GDT-Import des aktiven Patienten.

5.2.3 Schaltfläche „Manuelle Messwerte...“

Zusätzliche Messwerte können hier der aktiven Messreihe hinzugefügt werden.

5.2.4 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck der Messwertliste.


Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 5.7.3) "PDF-Datei" ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist medi_pat#_JJJJMMTT_m.pdf.

pat# = Patientenummer
 JJJJMMTT = Datum der Messung
 m = Kennbuchstabe für Messung


5.2.5 Schaltfläche „Messwerte auslesen...“

Nur für medicus PC2 und medilife PC3.


Verbinden Sie das Messgerät mit dem PC.

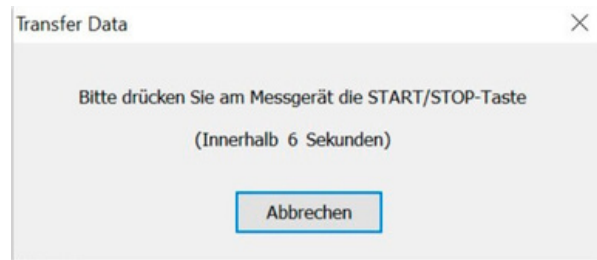

Nach Betätigung der Schaltfläche „Messwerte auslesen...“ muss am Blutdruckmessgerät innerhalb 6 Sekunden die START/STOP-Taste gedrückt werden, um die Datenübertragung am Blutdruckmessgerät zu starten. Die Messdaten werden vom angeschlossenen Messgerät übertragen.

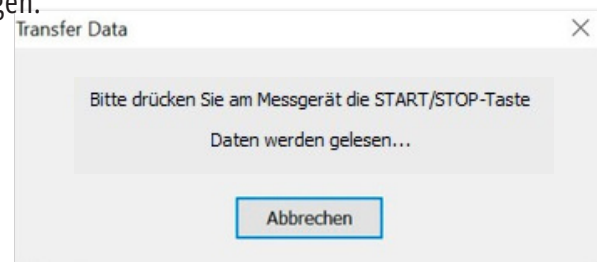

Nach erfolgreicher Datenübertragung kann ein neuer Zeitraum angelegt werden oder die Daten an einen bereits vorhandenen Zeitraum angehängt werden.

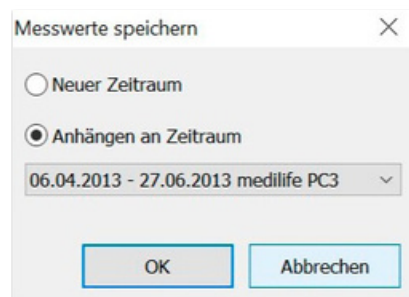


5.2.6 Schaltfläche „Intervallgrenzen...“

Hier können die Grenzen für Vormittags- und Nachmittagsmessungen definiert werden. Vorgabe ist 0:00 bis 11:59 Uhr für Vormittag und 12:00 bis 23:59 Uhr für Nachmittag.

5.2.7 Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“

Hier kann die Auswahl der Messwerte auf Vormittagsmessungen oder Nachmittagsmessungen eingegrenzt werden.

5.2.8 Auswahl „Zeitraum“

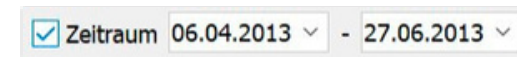

Durch die Auswahl des Zeitraums kann innerhalb aller Messwerte ein beliebiger Auswertungszeitraum gewählt werden. Ein Klick auf das Pfeilsymbol in den Datumsfeldern öffnet ein Kalenderblatt zur einfacheren Auswahl.



Durch Klicken auf den Monat oder das Jahr können diese direkt verändert werden.

5.3 Register „Profil Sys/Dia“



Hier wird der Blutdruckverlauf angezeigt. Um nähere Informationen zu einzelnen Messwerten zu bekommen, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Messung. Am linken oberen Rand des Diagramms werden das Datum, die Uhrzeit und der Messwert angezeigt. Um Bereiche der Kurve detaillierter darzustellen, ist eine Zoomfunktion verfügbar. Mit gedrückter linker Maustaste wird der Zoombereich gewählt indem innerhalb des Diagramms die Maus von links unten nach rechts oben bewegt wird. Die Zoomfunktion wird aufgehoben, indem innerhalb des Diagramms die Maus mit gedrückter linker Maustaste von rechts oben nach links unten geführt wird.

5.3.1 Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“

Hier kann die Auswahl der Messwerte auf Vormittagsmessungen oder Nachmittagsmessungen eingegrenzt werden.

5.3.2 Auswahl „Zeitraum“

☒ Zeitraum 06.04.2013 - 27.06.2013

Durch die Auswahl des Zeitraums kann innerhalb aller Messwerte ein beliebiger Auswertungszeitraum gewählt werden. Ein Klick auf das Pfeilsymbol in den Datumsfeldern öffnet ein Kalenderblatt zur einfacheren Auswahl. Durch Klicken auf den Monat oder das Jahr können diese direkt verändert werden.



5.3.3 Auswahlfeld „Zeitfenster“

Auswahl, über welchen Zeitbereich die Messungen angezeigt werden. Zur Wahl stehen Auto, Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr. Standardmäßig ist die Einstellung „Auto“ gewählt. Hierbei wird das Zeitfenster von der ersten bis zur letzten Messung skaliert. Durch Drücken der rechten Maustaste im Diagramm kann die Grafik mit der Maus horizontal verschoben werden.


5.3.4 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck des Profils SYS/DIA und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 5.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist medi_pat#_JJJJMMTT_sys.pdf.

pat# = Patientennummer
JJJJMMTT = Datum der Messung
sys = Kennbuchstabe für SYS/DIA

5.4 Register „Profil MAP“

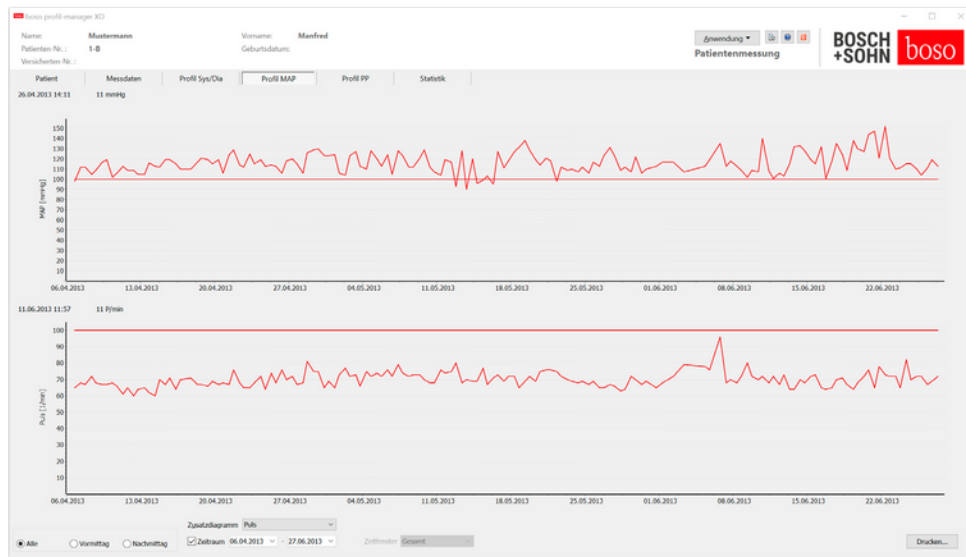

Hier wird der Verlauf des berechneten mittleren arteriellen Blutdrucks angezeigt (MAP = Diastole DIA + 1/3 Pulsdruck PP).

Um nähere Informationen zu einzelnen Messwerten zu bekommen, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Messung. Am linken oberen Rand des Diagramms werden das Datum, die Uhrzeit und der Messwert angezeigt. Um Bereiche der Kurve detaillierter darzustellen, ist eine Zoomfunktion verfügbar. Mit gedrückter linker Maustaste wird der Zoombereich gewählt, indem innerhalb des Diagramms die Maus von links unten nach rechts oben bewegt wird. Die Zoomfunktion wird aufgehoben, indem innerhalb des Diagramms die Maus mit gedrückter linker Maustaste von rechts oben nach links unten geführt wird.

5.4.1 Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“

Hier kann die Auswahl der Messwerte auf Vormittagsmessungen oder Nachmittagsmessungen eingegrenzt werden.

5.4.2 Auswahl „Zeitraum“

☒ Zeitraum 06.04.2013 - 27.06.2013

Durch die Auswahl des Zeitraums kann innerhalb aller Messwerte ein beliebiger Auswertungszeitraum gewählt werden. Ein Klick auf das Pfeilsymbol in den Datumsfeldern öffnet ein Kalenderblatt zur einfacheren Auswahl. Durch Klicken auf den Monat oder das Jahr können diese direkt verändert werden.



5.4.3 Auswahlfeld „Zeitfenster“

Auswahl, über welchen Zeitbereich die Messungen angezeigt werden. Zur Wahl stehen Auto, Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr.

Standardmäßig ist die Einstellung „Auto“ gewählt. Hierbei wird das Zeitfenster von der ersten bis zur letzten Messung skaliert.

Durch Drücken der rechten Maustaste im Diagramm kann die Grafik mit der Maus horizontal verschoben werden.

5.4.4 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck des MAP-Profiles und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 5.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist medi_pat#_JJJJMMTT_map.pdf

pat# = Patientenummer
JJJJMMTT = Datum der Messung
map = Kennbuchstabe für MAP

5.5 Register „Profil PP“



Hier wird der Verlauf des berechneten Pulsdrucks angezeigt (PP = SYS – DIA).

Um nähere Informationen zu einzelnen Messwerten zu bekommen, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Messung. Am linken oberen Rand des Diagramms werden das Datum, die Uhrzeit und der Messwert angezeigt. Um Bereiche der Kurve detaillierter darzustellen, ist eine Zoomfunktion verfügbar. Mit gedrückter linker Maustaste wird der Zoombereich gewählt, indem innerhalb des Diagramms die Maus von links unten nach rechts oben bewegt wird. Die Zoomfunktion wird aufgehoben, indem innerhalb des Diagramms die Maus mit gedrückter linker Maustaste von rechts oben nach links unten geführt wird.

5.5.1 Auswahl „Alle, Vormittag, Nachmittag“

Hier kann die Auswahl der Messwerte auf Vormittagsmessungen oder Nachmittagsmessungen eingegrenzt werden.

5.5.2 Auswahl „Zeitraum“

☒ Zeitraum 06.04.2013 - 27.06.2013

Durch die Auswahl des Zeitraums kann innerhalb aller Messwerte ein beliebiger Auswertungszeitraum gewählt werden. Ein Klick auf das Pfeilsymbol in den Datumsfeldern öffnet ein Kalenderblatt zur einfacheren Auswahl. Durch Klicken auf den Monat oder das Jahr können diese direkt verändert werden.

Juni 2013						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

☐ Heute: 24.02.2020

5.5.3 Auswahlfeld „Zeitfenster“

Auswahl, über welchen Zeitbereich die Messungen angezeigt werden. Zur Wahl stehen Auto, Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr.

Standardmäßig ist die Einstellung „Auto“ gewählt. Hierbei wird das Zeitfenster von der ersten bis zur letzten Messung skaliert.

Durch Drücken der rechten Maustaste im Diagramm kann die Grafik mit der Maus horizontal verschoben werden.

5.5.4 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck des Pulsdruckprofils und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 5.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist medi_pat#_JJJJMMTT_pp.pdf.

pat# = Patientenummer
 JJJJMMTT = Datum der Messung
 pp = Kennbuchstabe für Pulsdruck

5.6 Register „Statistik“

Patientenmessung Statistik (06.04.2013-27.06.2013)

Gesamt (00:00-24:00)
Messwerte: 156 - Arrhythmien erkannt: 1

	Min	Mittel	Max	StdAbw.	> Limit
SYS [mmHg]	113	160,9	208	19,5	96,2%
DIA [mmHg]	67	93,5	127	11,6	77,6%
Puls [1/min]	60	70,1	96	4,8	0,0%
MAP [mmHg]	90	116,0	152	10,5	95,5%
PP [mmHg]	27	67,5	125	21,8	76,3%

Vormittag/Nachmittag Abweichung

SYS	1,7%	Abenkung am Nachmittag
DIA	0,9%	Anstieg am Nachmittag
Puls	0,4%	Anstieg am Nachmittag
MAP	0,3%	Abenkung am Nachmittag
PP	5,3%	Abenkung am Nachmittag

Vormittag (00:00-12:00)
Messwerte: 76 - Arrhythmien erkannt: 1

	Min	Mittel	Max	StdAbw.	> Limit
SYS [mmHg]	113	162,3	208	20,8	96,2%
DIA [mmHg]	69	93,1	127	11,6	76,9%
Puls [1/min]	60	69,9	82	4,7	0,0%
MAP [mmHg]	95	116,1	152	10,6	96,2%
PP [mmHg]	27	69,3	125	23,2	79,5%

Nachmittag (12:00-00:00)
Messwerte: 78 - Arrhythmien erkannt: 0

	Min	Mittel	Max	StdAbw.	> Limit
SYS [mmHg]	131	159,6	201	18,2	96,2%
DIA [mmHg]	67	93,9	125	11,6	78,2%
Puls [1/min]	62	70,2	96	4,9	0,0%
MAP [mmHg]	90	115,8	144	10,5	94,9%
PP [mmHg]	28	65,6	115	20,2	73,1%

Drucken...

5.6.1 Schaltfläche „Drucken...“

Ausdruck des Profils SYS/DIA und des Pulsprofils sowie der Statistik.

Wurde in den Druckeinstellungen (Kapitel 5.7.3) „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist `medi_pat#_JJJJMMTT_sys.pdf`.

pat# = Patientennummer
JJJJMMTT = Datum der Messung
sys = Kennbuchstabe für SYS/DIA

Es werden die Messungen des Gesamt-, Vormittag- und Nachmittag-Zeitraums getrennt ausgewertet.

Die Gesamtsumme der Messwerte in den einzelnen Zeiträumen und die Anzahl der dabei erkannten Arrhythmien werden angezeigt.

In den einzelnen Spalten werden folgende Werte angezeigt:

Min: kleinster Wert im entsprechenden Intervall

Mittel: arithmetischer Mittelwert im entsprechenden Intervall


Max: größter Wert im entsprechenden Intervall

StdAbw.: Standardabweichung im entsprechenden Intervall

> Limit: prozentualer Anteil über den festgelegten Grenzwerten. Prozentuale(r) Anstieg/Absenkung am Nachmittag wird angezeigt.


5.7 Schaltfläche „Einstellungen...“ im Register „Patient“

5.7.1 Unterregister „Arzt“

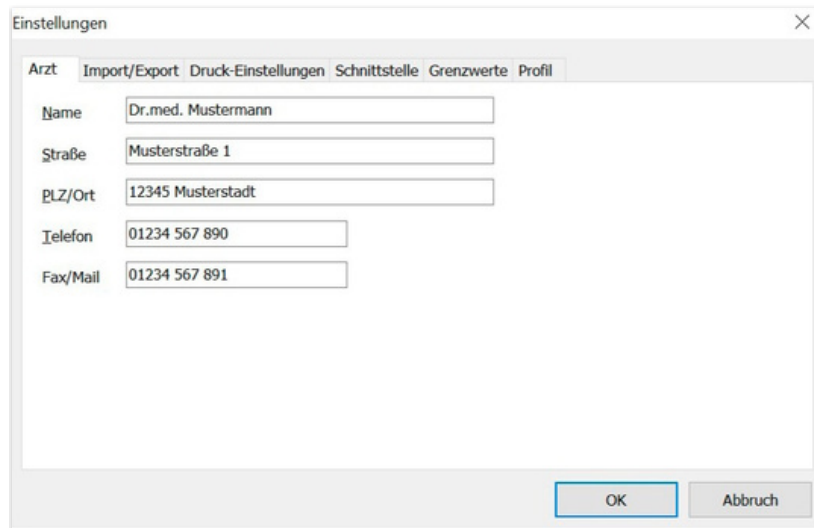

Im Unterregister „Arzt“ erfolgt die Eingabe der persönlichen Daten des behandelnden Arztes als Basis für die Fußzeile im Ausdruck.

5.7.2 Unterregister „Import/Export“

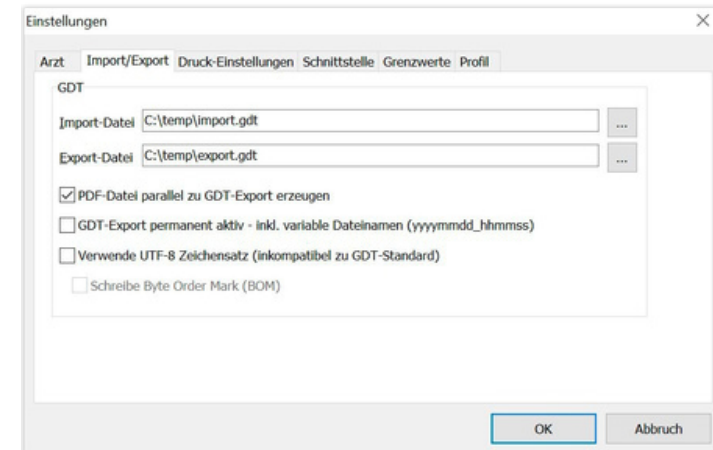

Bei Verwendung einer Praxis-EDV, die die GDT-Schnittstelle unterstützt, werden hier die Pfad- und Dateinamen für die Export- bzw. Import-Datei festgelegt. Über die Schaltflächen neben den Eingabefeldern für Import- und Exportdatei haben Sie direkt Zugriff auf die Verzeichnisstruktur von Windows.

Beispiel: c:\prax_edv\import.gdt

Import-Datei = Export-Datei der Praxis-EDV

Export-Datei = Import-Datei der Praxis-EDV


Der GDT-Import erfolgt automatisch beim Programmstart oder manuell durch Bestätigung der Schaltfläche „Export/Import -> Import GDT“, wenn eine gültige GDT-Importdatei im vorgegebenen Verzeichnis vorhanden ist. Der GDT-Export erfolgt nur, wenn der von der Praxis-EDV importierte Patient aktiv ist. Der Export erfolgt automatisch beim Beenden des Programms (sofern während der aktuellen Programmsitzung Messdaten vom Gerät eingelesen wurden) oder manuell jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche „Export GDT“ im Register „Messdaten“.



Der Datenexport ist deaktiviert, wenn der Patient nach dem automatischen Import gewechselt wurde. Er wird erneut aktiviert, wenn dieser Patient wieder gewählt wird. Der Datenexport ist ebenfalls deaktiviert, wenn zuvor kein Import erfolgt ist.

Weitere Hinweise zu den verfügbaren Optionen „PDF-Datei parallel zu GDT-Export erzeugen“, „GDT-Export permanent aktiv“ und „Verwende UTF-8 Zeichensatz“ siehe 3.4.2.

5.7.3 Unterregister „Druck-Einstellungen“

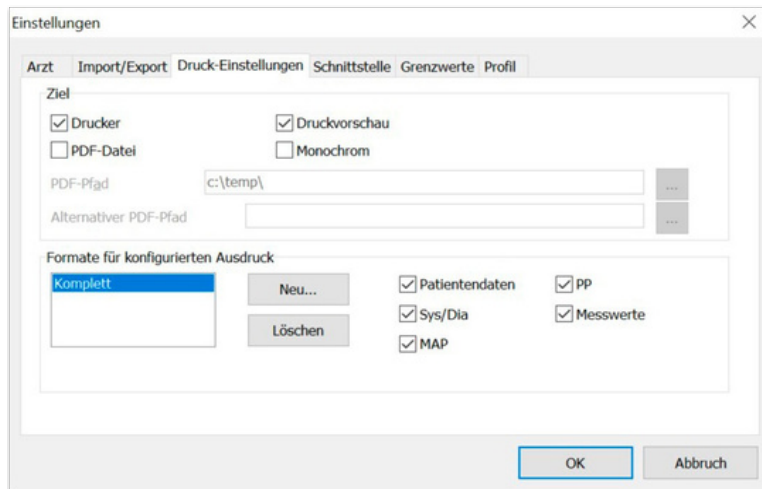

Im Register „Druck-Einstellungen“ legen Sie fest, ob der Ausdruck in Papierform, als Bildschirmdruck und/oder als PDF-Dokument ausgegeben werden soll, nachdem die jeweiligen Schaltflächen [Drucken...] im Programmablauf betätigt wurden.

Wird „Drucker“ ausgewählt, so wird bei Betätigung der Schaltflächen [Drucken...] im Programmablauf der Windows Druckdialog angezeigt.


Wird zusätzlich „Druckvorschau“ ausgewählt, so wird vor dem Druck die Druckvorschau angezeigt.

Wird „PDF-Datei“ ausgewählt, so wird eine PDF-Datei erzeugt. Der Dateiname dieser PDF-Datei ist anwendungsspezifisch aufgebaut und wird in den einzelnen Anwendungen näher beschrieben.




Mindestens ein Medium „Drucker“ oder „PDF-Datei“ muss gewählt werden.

Wird die Option „Monochrom“ ausgewählt, so erfolgt der Ausdruck einfarbig. Durch Betätigung des Drucker-Symbols „Konfigurierter Ausdruck“ wird das hier konfigurierte Ausdruckformat verwendet und nur die hier gewählten Seiten gedruckt.

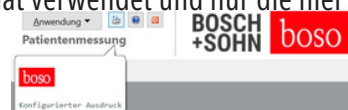

5.7.4 Unterregister „Schnittstelle“

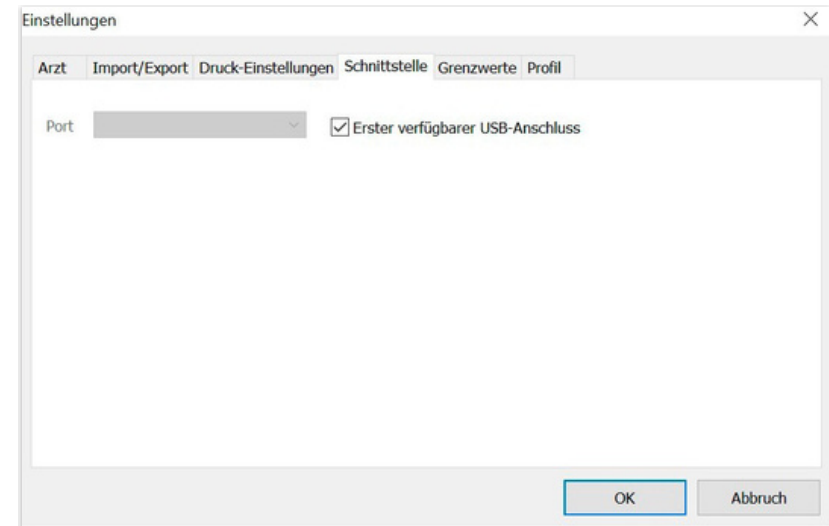

Legen Sie hier fest, wie die Verbindung zwischen dem Blutdruckmessgerät und dem PC hergestellt wird. Bei aktiver Option „Erster verfügbarer USB-Anschluss“ wird der erste FTDI USB-Anschluss unter Windows zur Datenübertragung verwendet. Sind mehrere FTDI USB-Anschlüsse installiert, so sind die nicht benötigten Anschlüsse vom Computer zu trennen oder die Option zu deaktivieren. Bei nicht aktiver Option „Erster verfügbarer USB-Anschluss“ wird die in der Port-Liste gewählte serielle Schnittstelle (COM) oder USB-Anschluss zur Datenübertragung verwendet.

5.7.5 Unterregister „Grenzwerte“

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Grenzwerte' (Limits) tab selected. The window contains three columns of input fields for blood pressure limits: 'Gesamt' (Overall), 'Vormittag' (Morning), and 'Nachmittag' (Afternoon). Each column has five fields: Systole, Diastole, Puls, MAP, and PP. The 'Gewicht' (Weight) field is also visible with a value of 25,0. The 'OK' button is highlighted.

Parameter	Gesamt	Vormittag	Nachmittag
Systole	135	135	135
Diastole	85	85	85
Puls	100	100	100
MAP	100	100	100
PP	50	50	50

Weight (Gewicht): BMI 25,0

Um eine individuelle Auswertung zu ermöglichen, können die Grenzwerte für die einzelnen Zeiträume festgelegt werden. Die Einstellung der Grenzwerte für Vormittag und Nachmittag beziehen sich auf die Intervallzeiten Vormittag und Nachmittag.

5.7.6 Unterregister „Profil“

In den Profildarstellungen (Register „Profil Sys/Dia, MAP, PP“) wird standardmäßig eine Hüllkurve (Verbindungsline zwischen den einzelnen Messpunkten) gezeichnet und die Grenzwerte als horizontale Linie dargestellt. Sowohl Hüllkurve als auch Grenzwertlinien können hier ausgeblendet werden.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Profil' (Profile) tab selected. The 'Anzeige' (Display) section contains two checked options: 'Hüllkurve zeichnen' (Draw envelope curve) and 'Grenzwerte einzeichnen' (Draw limit values). The 'OK' button is highlighted.

6 Garantiebestimmungen

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte garantiert boso, dass der Datenträger der Software innerhalb 90 Tagen ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Aufgrund der vorstehend erteilten Garantieversprechen ist boso verpflichtet, den Datenträger mit enthaltener Software unter folgenden Bedingungen zu ersetzen: - der Kunde/Käufer benachrichtigt boso schriftlich über den Fehler innerhalb 90 Tagen ab Kaufdatum oder - der Kunde/Käufer gibt den fehlerhaften Datenträger innerhalb 90 Tagen an den Händler oder direkt an boso unter folgender Adresse zurück:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Bahnhofstr. 64
72417 Jungingen, Germany

Über das vorstehend erteilte Garantieversprechen hinaus übernimmt boso weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Garantie.

7 Haftungsbeschränkungen

- a) Die Software wird Ihnen auf der Grundlage des aktuellen Entwicklungsstands zur Verfügung gestellt.
- b) Unbeschadet der Regelung in Kapitel 6 übernehmen boso und seine Händler keine Haftung für Risiken in Bezug auf Ergebnisse und Leistungen der Software. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Schäden wegen verlorener oder beschädigter Daten oder für andere kommerzielle oder wirtschaftliche Verluste.
- c) Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und soweit uns oder unsere Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

8 Bildzeichenerklärung



Gebrauchsanweisung beachten!



Herstellungsjahr



Hersteller



Das CE-Kennzeichen dokumentiert die Übereinstimmung mit der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG, Benannte Stelle: DEKRA, 0124



Wichtige Hinweise



Medizinprodukt

Auszug aus der GDT-Satzbeschreibung

Im Folgenden sind die zur Realisierung der GDT-Schnittstelle dieser Software erforderlichen Satzarten und die darin enthaltenen Feldkenner beschrieben:

Satzart 6302 „Neue Untersuchung anfordern“

Feld 8000: 8100: Satzidentifikation
Direktaufruf Patient
Satzlänge
GDT-ID des Empfängers
GDT-ID des Senders
BDM01: Direktaufruf 24h-Messung
BDM02: Direktaufruf ABI/PWV-Messung
9218: Versionsnummer GDT
3000: Patientennummer
3101: Name des Patienten
3102: Vorname des Patienten
3103: Geburtsdatum des Patienten
3105: Versichertennummer
3106: Wohnort des Patienten
3107: Straße des Patienten
3110: Geschlecht des Patienten (1 = männl., 2= weibl.)
3622: Größe des Patienten (cm)
3623: Gewicht des Patienten (kg)

Satzart 6310 „Daten einer Untersuchung übermitteln“

Feld 8000: Satzidentifikation
8100: Satzlänge
8315: GDT-ID des Empfängers
8316: GDT-ID des Senders
9218: Versionsnummer GDT
3000: Patientennummer/Patientenkennung
8402: Geräte- und verfahrensspezifisches Kennfeld
6200: Datum der Untersuchung
6228: Ergebnistabellentext, formatiert
6302: Datei-Archivierungskenner
6303: Dateiformat
6304: Dateiinhalt
6305: Verweis auf Datei



BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64 | 72417 Jungingen, Germany | T + 49 (0) 7477 9275 - 0 | F + 49 (0) 7477 1021

E zentrale @ boso.de | boso.de