



# Milibac N

## Flächendesinfektion • Kalklöser

### Einsatzbereich

Zur Desinfektion säurebeständiger Flächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Industrie und öffentliche Einrichtungen (Sanitärbereich, Schwimmbad, Wellness). MILIBAC N entfernt mineralische und organische Verschmutzungen.

### Anwendung

Fläche mit MILIBAC N - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 2%igen Lösung: 980 ml Wasser vorlegen und 20 ml Produkt zugeben.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, Levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	2,0 % 15 Min.	EN 1276, Niedrige Belastung; EN 1650, Niedrige Belastung; EN 13697, Niedrige Belastung
Beagrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2,0 % 5 Min.	EN 14476, Niedrige und hohe Belastung
	2,0 % 5 Min.	EN 14476, Niedrige Belastung

### Technische Informationen

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter Art.-Nr. 003  
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 300

### Wirkstoffe

100 g enthalten 5,6 g Milchsäure; 3,0 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05

BAuA Reg.-Nr. N-84501

CHZN6347

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

levurozid  
HBV, HCV, Coronaviren)  
haften

riallen anwenden. Materialverträglichkeit vor Anwendung an  
sdatum ab Produktion 3 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 3  
chten.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0221

pH conc 

2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE