

Schnelldesinfektion Includal® Wipes



Einsatzbereich Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

Eigenschaften

- weiche Tücher getränkt in der Desinfektionsflüssigkeit Includal® Antisept
- begrenzt viruzid PLUS gemäß RKI-Empfehlung (inkl. Corona-, Influenza- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)
- bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid
- levurozid
- parfümfrei
- HACCP-konform (Tränklösung)



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wirksamkeit und Prüfmethode

Bakterien und Hefen	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid	VAH/EN 16615	Mit Mechanik, hohe Belastung	5 Minuten
Mykobakterizid (M.avium und M.terrae)	EN 14348	Niedrige Belastung	1 Minute
Tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	Niedrige Belastung	30 Sekunden

Viren	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Begrenzt viruzid	RKI/DVV	Inkl. HBV/HIV/HCV	30 Sekunden
Begrenzt viruzid PLUS	RKI/DVV	Inkl. HBV/HIV/HCV	3 Minuten
Wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	Niedrige Belastung	30 Sekunden
Wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	Niedrige Belastung	3 Minuten
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	Niedrige Belastung	1 Minute

Anwendungsgebiete:

Bei den INCLUDAL® WIPES handelt es sich um weiche Tücher, die mit dem Desinfektionsmittel INCLUDAL® ANTISEPT getränkt sind. INCLUDAL® WIPES eignen sich zur antimikrobiellen Reinigung der Hände sowie zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung auch für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet. INCLUDAL® WIPES sind bspw. geeignet zur Desinfektion von Toiletten-sitzen, Türgriffen, Telefonhörern und Spinden. Die Tränklösung ist HACCP-konform.

Wirkungsspektrum:

INCLUDAL® WIPES wirkt: bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS gemäß RKI/DVV (inkl. Corona-, Influenza- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)

Anwendungshinweise:

Alkoholbeständige Flächen und Gegenstände mit INCLUDAL® WIPES vollständig abwischen, bzw. ausreichend benetzen. Nicht geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen, z. B. Acrylglas. Nicht zur Entsorgung in der Toilette geeignet. Nur zur professionellen Anwendung.

Produktbeschreibung der Tränkflüssigkeit

INCLUDAL® ANTISEPT:

Klare, farblose, aldehyd- und parfümfreie, alkoholische (ca. 45 %) Lösung.

Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

INCLUDAL® ANTISEPT:

100 g Lösung enthalten 45,0 g Ethanol.

Hinweise zur Handhabung:

Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Formen Sie aus der geöffneten Packung eine Rolle. Lassen Sie den Inhalt inkl. Beutel direkt in die Spenderdose gleiten. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose und setzen Sie den Deckel wieder auf die Dose. Bitte befüllen Sie die Dose nur mit einer Nachfüllpackung mit INCLUDAL® WIPES Refill!

Lagerungshinweise:

INCLUDAL® WIPES ist in der originalverschlossenen Nachfüllpackung bei Raumtemperatur lagerfähig. Das jeweilige Haltbarkeitsdatum ist auf der Nachfüllverpackung angegeben. Die Haltbarkeit nach Anbruch von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern beträgt 3 Monate, sofern nach jeder Tuchentnahme die Verpackung sorgfältig wieder verschlossen wird.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gesetzliche Vorschriften:

INCLUDAL® WIPES ist ein Biozid gemäß der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012.

BAuA Reg.-Nr.: N-52790, N-52791 und N-84660

Reg.-Nr. FR: 72900, Reg.-Nr. NO: 638130

Ein EG-Sicherheitsdatenblatt für die Tränkflüssigkeit INCLUDAL® ANTISEPT liegt vor und kann unter www.myxal.de heruntergeladen werden.

Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien:

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter fest verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Bestelldaten INCLUDAL® WIPES:

INCLUDAL WIPES REFILL NACHFÜLLPACK MIT 120 BLATT (12 x 17,5 cm) BSW-Nr.: 13887001 12 x 120-Tücher = 1 VE ¹⁾	INCLUDAL WIPES DOSE MIT 120 TÜCHERN (12 x 17,5 cm) BSW-Nr.: 14306001 12 x Dose = 1 VE ¹⁾
--	---

¹⁾ VE = Verpackungseinheit

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverändert. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. **Stand: 02/2024**

Peter Greven Physioderm GmbH | Procter-&-Gamble-Straße 26 | 53881 Euskirchen | Germany
Tel.: +49 (0)2251 77617-0 | Fax: +49 (0)2251 77617-44 | info@pgp-hautschutz.de | www.myxal.de



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.