

Sterillium® 2 in 1 wipes

Praktische 2 in 1 Desinfektionstücher zur Hände- und Flächendesinfektion.



Produkteigenschaften

2 in 1 für Hände & Oberflächen **TO GO**

- Beseitigt 99,99 % der Bakterien, Hefepilze und speziellen Viren
- Für Hände- und Flächendesinfektion geeignet
- Praktisch für unterwegs
- 100% plastikfreie Viskosetücher
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

Anwendungsgebiete

Die praktischen Sterillium® 2 in 1 Desinfektions-Tücher geben ein gutes Gefühl – zu Hause und unterwegs. Sie bieten wirksamen Schutz und beseitigen 99,99 % der Bakterien, Hefepilze und spezielle Viren auf vielen Händen und Oberflächen. Durch das handliche Format können die Tücher in allen Lebenslagen zum Einsatz kommen und überzeugen nach der Anwendung mit einem erfrischenden Geruch.

Die Tücher können auf Smartphone-Displays aus Glas eingesetzt werden. Die Materialverträglichkeit ist vorab zu überprüfen. Nicht für Acrylglas geeignet.

Wirksamkeit	Einwirkzeit Hände	Einwirkzeit Fläche
Bakterien / Pilze		
Bakterizidie ¹⁾	60 Sek.	30 Sek.
Levurozidie ²⁾	60 Sek.	30 Sek.
Viren		
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) ³⁾	15 Sek.	15 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS	30 Sek.	30 Sek.
Adenoviren	30 Sek.	30 Sek.
Noroviren	30 Sek.	30 Sek.
Rotaviren	15 Sek.	15 Sek.

1. *S. aureus* (inkl. MRSA), *E. hirae*, *E. coli*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, *M. terrae* (tuberkulozid)

2. *C. albicans*

3. BVDV, Vacciniavirus, HBV, HIV, HCV, H5N1, H1N1, Coronaviren (wie z. B. Sars-CoV-2), Herpes Simplex.
Begrenzt viruzid PLUS nach EN14476

Anwendung

Händedesinfektion:

Mit einem Tuch die Hände 60 Sekunden lang gründlich benetzen. Die Hände müssen optisch sauber sein und während der gesamten Applikationszeit durch das Präparat feucht gehalten werden.

Flächendesinfektion:

Flächen und Gegenstände mit einem Tuch vollständig benetzen und 30 Sekunden einwirken lassen. Die Fläche trocknet nach kurzer Zeit rückstandsfrei ab.

Wirkstoffe

100 g enthalten: 22,0 g Ethanol, 21,0g 2-Propanol, 8,0 g 1-Propanol

Wirkpektrum

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS (inkl. Norovirus).

Sterillium® 2 in 1 wipes



Chemisch-physikalische Daten

Dichte (bei 20 °C) ca.0,9 g/cm³
Flammpunkt 25 °C
(GHS 051755)
Abmessungen Tuch: 150 x 200 mm

Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
hartmann-science-center.com



Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Sterillium® 2 in 1 wipes	Packung 15 Feuchttücher	981 942	18835975	12

*Biozidprodukt vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info