

# B. Braun Wipes mini ECO

Kleines nachfüllbares Vliestuchspendersystem



Hygiene

# B. Braun Wipes mini ECO

## Kleines nachfüllbares Vliestuchspendersystem

Nachfüllbare Tuchspenderdose zum Befüllen mit ca. 0,7 Liter Desinfektionsmittellösung

Tuchrolle mit 60 trockenen Tüchern

Synthetisches Vliesmaterial (100 % PET)

Tuchgröße 15 x 20 cm

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel: Hexaquart® forte, Hexaquart® plus / lemon fresh, Melsept® SF, Meliseptol® rapid, Meliseptol® Foam pure, Helipur® H plus N

4 Wochen Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung mit den B. Braun Wipes mini ECO

Den Tuchrollen liegt ein Aufkleber zum Beschriften des Spenders bei:

<b>B. Braun Wipes mini ECO</b> Салфетки флисовые B. Braun mini ECO Enthält gebrauchsfertige Reinigungs- / Desinfektionslösung		
Produktname: Product name: Nom du Produit: Название дез. средства:	LOT: REF: <b>19725</b> PZN: 10312255	
Konzentration: Concentration: Concentration: Концентрация дез. средства:	Einwirkzeit: Action time: Temps d'action: Время действия:	haltbar bis: Use by: de préf. avant fin: Использовать до:
angesetzt am: Filled on: Date d. rempliss.: Дата розлива:	Name: Name: Nom: Ф.И.О.:	
<b>B   BRAUN</b> Nachfüllbarer Desinfektionstuchspender / Refillable Fleece Wipe Dispenser / Distributeur rechargeable de lingettes en non-tissé		



### Hinweise zur Anwendung und Dosierung

1. Handschuhe tragen
2. Vliesrolle einsetzen
3. Circa 0,7 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Minuten warten, bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist
4. Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch werfen; Deckel unmittelbar nach der Tuchentnahme wieder verschließen
5. Aufkleber beschriften und aufkleben

### Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit den B. Braun Wipes mini ECO-Vliestüchern geprüft. Die B. Braun Wipes mini ECO-Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

Produkt	Lieferform	Art.-Nr.	PZN
B. Braun Wipes mini ECO	Spenderdose mit blauem Deckel (ohne Vliesrolle)	19182	10312249
	Vliesrolle mit 60 Tüchern	19725	10312255
			

B. Braun Produkt	Mindestkonz.	EZ	Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung
Hexaquart® forte	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus lemon fresh	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Melsept® SF	1,0 %	60 Min.	4 Wochen
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.	4 Wochen
Meliseptol® Foam pure	konz.	1 Min.	4 Wochen
Helipur® H plus N	4,0 %	15 Min.	4 Wochen