

ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT IN **XL**

Incidin™ OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂™

PRAXISNAH NACH
EN 16615
GETESTET

Die innovativen Produkte Incidin™ OxyFoam & Incidin OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von OxyWipe wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Incidin™ OxyFoam & OxyWipe bieten:

- ▲ Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit



Incidin™ OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂™

15 SEK² **Bakterizid** (EN 13727/16615) **15 SEK²** **Viruzid gegen behüllte Viren** **15 MIN²** **Noroviruzid**

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
EFFEKTIV	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
SICHER!	Exzellente Materialverträglichkeit - Keine aktiven Rückstände - Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
ANWENDERFREUNDLICH	Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel - Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt

WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM	Einwirkzeit OXYWIPE
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	15 Min.	15 Min.
Tuberkulozid, mykobakterizid	15 Min.	60 Min.
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	15 Sek.	30 Sek.
Rotavirus*	30 Sek.	30 Sek.
Adenovirus*	1 Min.	15 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	30 Sek.	30 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	15 Sek.	1 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid)	5 Min.	15 Min.
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)	15 Min.	60 Min.
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	1 Min.
EN 14476 (Norovirus)	15 Min.	60 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	15 Sek.	5 Min.
EN 16615 (levurozid)	15 Sek.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	15 Min.	60 Min.

* DVV 2015 (Susp. Test)

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR INCIDIN™ OXYFOAM

- 1 Aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

- 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
 Richtistrasse 7
 8304 Wallisellen
 Switzerland
 +41(0) 44-877-2001
 www.ecolab.eu

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 +49(0) 2173-599-1900
 www.ecolabhealthcare.de

CE 0297



ANWENDUNGSBEREICH

Incidin™ OxyFoam:
 Schaumspray zur Reinigung und Desinfektion medizinischer Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und medizinischem Inventar.



Incidin™ OxyWipe:
 Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinische Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und Inventar.



BIOZID N-61595
 BIOZID N-61592

GEBRAUCHSANWEISUNG

Incidin™ OxyFoam: Anwendungsfertige Lösung. Unverdünt auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.

Incidin™ OxyWipe: Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen. Nicht geeignet zur Schlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

WIRKSTOFF

100 g enthalten:

Incidin™ OxyFoam: 1,5 g Wasserstoffperoxid
Incidin™ OxyWipe: 1,0 g Wasserstoffperoxid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ OxyFoam	6 x 750 ml	30 821 60 PZN 1115 60 47
Incidin™ OxyWipe	6 x 100 Tücher Tuchgröße: 20 x 20 cm	30 823 60 PZN 1115 60 53
Incidin™ OxyWipe XL	6 x 50 Tücher Tuchgröße: 25 x 37 cm	30 920 80 PZN 138 320 09
Wandhalterung für Incidin™ OxyWipe	1 x 6 Stück	100 338 77

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Incidin™ OxyFoam:
 Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum
Incidin™ OxyWipe: 3 Monate

Referenzen

1. Exzellente Materialverträglichkeit - Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff.
2. Incidin™ OxyFoam (EN 13727/EN 16615/EN 14476)

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.